

A vibrant blue background with a complex, organic texture that resembles ripples in water or the surface of a stone. The texture is composed of numerous small, overlapping, vein-like patterns that create a sense of depth and movement. The color is a rich, saturated blue, with subtle variations in tone and intensity across the surface.

Duette Progressive

NOVA
optiforum

Duette Progressive

PT



Semestral



1 Unid.



SynergEyes



Parâmetros

Tipologia de lente	Híbrida
Geometrias	Esférica Progressiva
Raio de curvatura (mm)	7.10 a 8.30 (0.10)
Diâmetro (mm)	14.50
Potência esférica (D)	-10.00 a +5.50
Saia	Flat1, Flat2, Medium



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
Material

Composição	Centro: RGP Saia: Silicone de Hidrogel
Dk	Centro: 130 Saia: 84
Filtro UV	Sim - Classe II
Filtro Luz Azul	Não
Cor de manipulação	Não



Soluções recomendadas

Solução de estojo	Eyeye Comfort All-in-one
Solução de limpeza	Oté Clean



Apresentação

A gama SynergEyes, lentes de contacto híbridas, é composta por uma lente com um centro RGP de alto Dk e saia hidrófila. Todas as lentes da gama SynergEyes são aprovadas pelo FDA, e são patenteadas com a tecnologia híbrida, aliando um óptimo conforto durante todo o dia, a uma visão de excelente qualidade. A Duette Progressive vem revolucionar o mercado das lentes híbridas com a nova geração de materiais de alto Dk, compostas por centro RGP com Dk 130 e com saia de silicone de hidrogel de Dk 84. É especialmente indicada para todos os indivíduos com córneas normais que tenham chegado à presbiopia.



Guia de adaptação

Seguir o procedimento de adaptação da lente Duette HD. Escolher a adição adequada ao usuário e encomendar as lentes. Primeiro dia de utilização das lentes:

- Fazer avaliação do conforto, da mobilidade da lente e da acuidade visual num ambiente real sem fazer sobre refração.
- Ensinar a manusear as lentes e marcar nova consulta para 1 ou 2 semanas depois.