




DIGITSOLE[®]
PRO

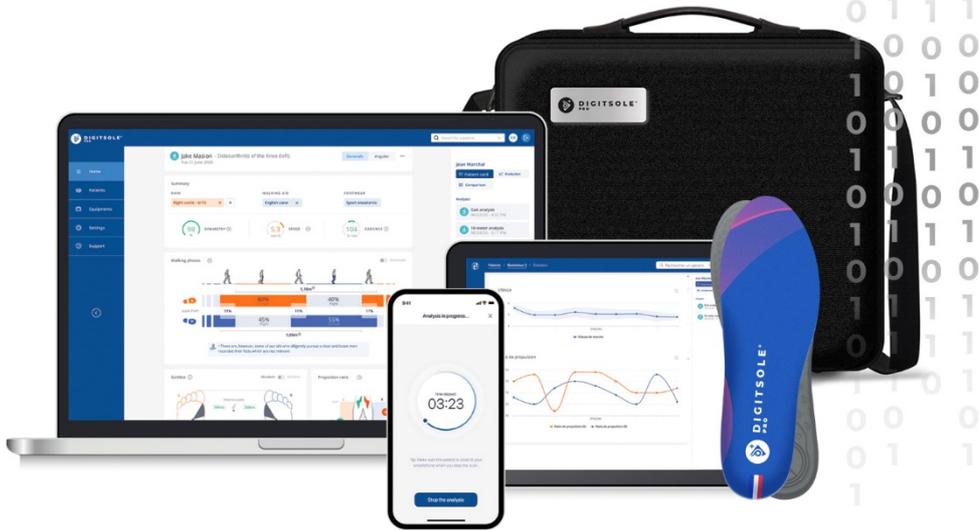

FAQ

Informations Produit.....	5
Quel est le contenu de mon kit Digitsole® Pro ?.....	5
Quelle est la compatibilité de l'interface web ?.....	5
Quelle est la compatibilité de l'application ?	5
Quelle est la vitesse minimale d'internet recommandée ?.....	5
Quels sont les conseils pour utiliser Digitsole Pro ?	5
Semelles & DSPods.....	6
Comment insérer les DSPods dans les semelles Digitsole® Pro ?	6
Comment recharger mes DSPods?.....	7
Comment savoir si mes DSPods sont complètement chargés ?.....	7
Que signifient les LED des DSPods ?.....	8
Le Datamatrix de mon DSPod est effacé, que puis-je faire ?	8
Les DSPods sont-ils étanches ?.....	8
Puis-je me connecter à mes DSPods alors qu'un autre appareil Bluetooth est couplé avec mon téléphone ?	8
Puis-je avoir ce module seul ?	8
Puis-je utiliser les DSPods sans les semelles ?.....	8
Comment nettoyer mes semelles ?.....	9
Que faire en fin de vie du produit ?	9
Je n'arrive pas à connecter les DSPods, que puis-je faire ?.....	10
Je n'arrive pas à mettre à jour les DSPods, que puis-je faire ?.....	10
Quelle est la portée des DSPods ? Dois-je me tenir à côté du téléphone ?	10
Interface Web	11
Comment créer un compte sur Digitsole® Pro ?.....	11
Comment activer le double facteur d'authentification ?.....	12
Comment se connecter à l'interface ?	13
Comment modifier mes informations de praticien ?.....	14
Comment ajouter un patient ?.....	15
Comment modifier un patient ?.....	16
Comment supprimer un patient ?.....	16
Comment rechercher un patient ?.....	17
Comment créer un filtre personnalisé ?.....	17
Comment ajouter des commentaires sur un rapport ou une acquisition ?	18
Comment comparer des acquisitions ?.....	19
Comment renommer une acquisition ?	20
Comment supprimer une acquisition ?.....	21
Comment voir les résultats d'analyse ?	22

Comment supprimer mon compte ?	22
Réglages	23
Comment changer de langue ?	23
Comment changer de système d'unités ?	23
Comment voir mes fonctionnalités ?	23
Comment ajouter une personne dans mon espace de travail ?	24
Sécurité	25
Comment puis-je être sûr que l'interface Web est sécurisée?	25
Que faire si l'URL est bloquée par mon antivirus ?	25
PDF	26
Que dois-je faire si j'ai des difficultés avec l'exportation PDF ?	26
Comment envoyer le rapport au patient par email ?	26
Comment générer un rapport ?	26
Comment générer un rapport de comparaison ?	28
Comment masquer certaines informations sur le rapport ?	29
Comment ajouter mon logo à un rapport ?	30
Comment imprimer un rapport ?	30
Acquisition.....	31
Où puis-je trouver les manuels d'interprétation de la marche et de la course ?	31
Pourquoi n'ai-je pas assez de pas à la fin de mon activité ?	31
Quelle est la vitesse de course minimale ?	31
Quelle est la vitesse de marche minimale ?	31
Quelle est la durée minimale d'une acquisition ?	32
Comment démarrer et arrêter une analyse ?	32
Application Mobile	34
Comment télécharger l'application mobile ?	34
Comment se connecter à l'application Digitsole® Pro ?	34
Comment ajouter des DSPods ?	35
Comment mettre à jour les DSPods ?	36
Comment supprimer les DSPods ?	36
Comment vérifier les niveaux de batterie des DSPods ?	37
Comment ajouter un patient?	37
Comment modifier un patient ?	38
Comment supprimer un patient ?	38
Comment contacter un patient ?	39
Comment rechercher un patient ?	39
Comment voir les résultats d'analyse ?	40

Module optionnel - Vidéo	41
Comment ajouter une vidéo depuis l'application mobile ?	41
Comment ajouter une vidéo depuis l'interface web ?	42
Comment supprimer une vidéo ?.....	42
Quelle est la durée maximale d'une vidéo ?	42
Module Optionnel - PRM	43
Comment le capteur DSPod mesure-t-il la détente ?	43
Dans l'application vidéo, les vidéos peuvent-elles être téléchargées sur mon interface web ?.....	43
Dois-je tester les deux pieds lors des tests ou puis-je n'en faire qu'un ?.....	43
Combien de temps faut-il pour exécuter la batterie de tests complète ?	43
Dois-je effectuer tous les tests pour que cela fonctionne ?.....	43
L'ordre dans lequel j'effectue les tests est-il important ?.....	43
J'ai effectué le Side Hop Test, et l'analyse n'a montré qu'une erreur, que s'est-il passé ?.....	44
Comment la stabilité des contacts est-elle calculée ?.....	44
Puis-je faire plusieurs tests à la suite sans m'arrêter ?	44
Est-il possible de faire trois tests de saut d'affilée et de voir la moyenne des trois tests ensemble sur le triple saut ?	44
Puis-je obtenir des données pour une seule jambe à partir d'un test CMJ ?.....	44
Puis-je utiliser un seul DSPod dans une seule chaussure pour collecter des données pour une seule jambe ?.....	44
Module Optionnel – Migration PodoSmart.....	45
Comment migrer mes données PodoSmart sans compte Digitsole Pro ?.....	45
Comment migrer mes données PodoSmart avec un compte Digitsole Pro ?	45
Que faut-il savoir sur la migration des analyses PodoSmart ?	47

Informations Produit

Quel est le contenu de mon kit Digitsole® Pro ?

Le kit Digitsole® Pro inclut une valise avec les éléments suivants :

- 6 semelles avec les tailles suivantes :
 - (Taille EU) 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45 et 46/47
 - (Taille US Men) 4.5/5.5, 6-7, 7.5-8.5, 9-10 and 10.5-11.5
 - (Taille US Women) 5.5/6.5, 7-8, 8.5-9.5, 10-11 and 11.5-12.5
- 2 DSPods (1 droit, 1 gauche)
- 1 Kit chargeur DSPods qui inclue une prise chargeur et un dock chargeur
- 1 document expliquant où trouver le manuel utilisateur et comment insérer les DSPods dans les semelles Digitsole
- 1 document expliquant l'utilisation du Kit chargeur
- Une bandoulière



Quelle est la compatibilité de l'interface web ?

L'interface Digitsole® Pro est compatible avec les PC et les tablettes (iOS, Android et Microsoft). Nous vous conseillons d'utiliser Google Chrome (version 87 à 90), Firefox (version 82 à 85) ou Edge (version 86 à 87).

Quelle est la compatibilité de l'application ?

L'application Digitsole® Pro est gratuite et fonctionne avec les appareils mobiles iOS 15.0+ et Android 6.0+.

Quelle est la vitesse minimale d'internet recommandée ?

La vitesse d'internet doit être d'au moins 30 Mbps (Megabits/Seconde).

Quels sont les conseils pour utiliser Digitsole Pro ?

Pendant une activité, il est important d'avoir une connexion internet la plus stable possible.


Il est également fortement conseillé d'être à proximité des DSPods (2 mètres maximum) lors du démarrage et de l'arrêt d'une activité.

Semelles & DSPods

Comment insérer les DSPods dans les semelles Digitsole® Pro ?

-Insérez les DSPods dans vos semelles comme suit :


- Identifier les DSPods gauche et droit

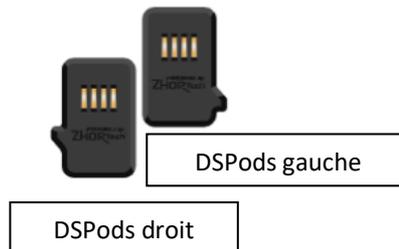

- Identifier la semelle gauche et la semelle droite




-Insérer le DSPod gauche dans la semelle gauche et le DSPod droit dans la semelle droite. Attention pour que l'acquisition fonctionne, il est nécessaire d'insérer les DSPods dans le bon sens (voir image ci-dessous).

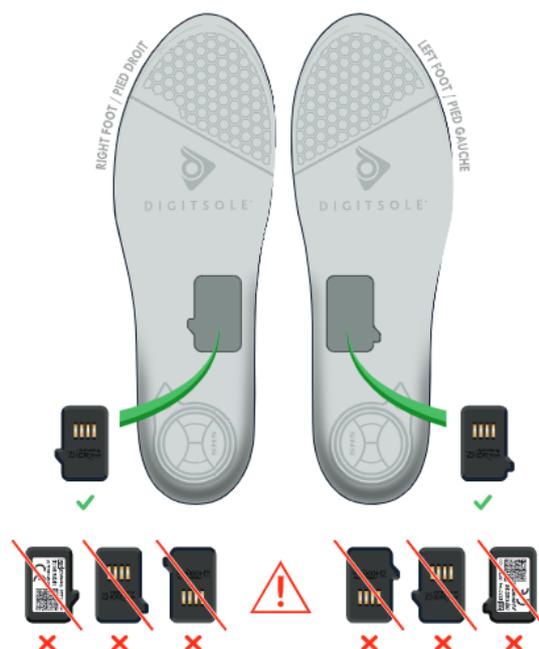

Comment recharger mes DSPods?

Sortez les DSPods des semelles et placez-les de part et d'autre du chargeur Plug USB. Une fois les deux boîtiers connectés sur le Plug USB, insérez le tout dans le chargeur réceptacle prévu à cet effet. Pour alimenter l'ensemble, branchez le réceptacle sur une prise USB de votre ordinateur ou sur une alimentation répondant aux exigences médicales telles que définies par IEC 60601-1 :2005 (1MOOP).

Le temps de recharge est d'environ 2h30.

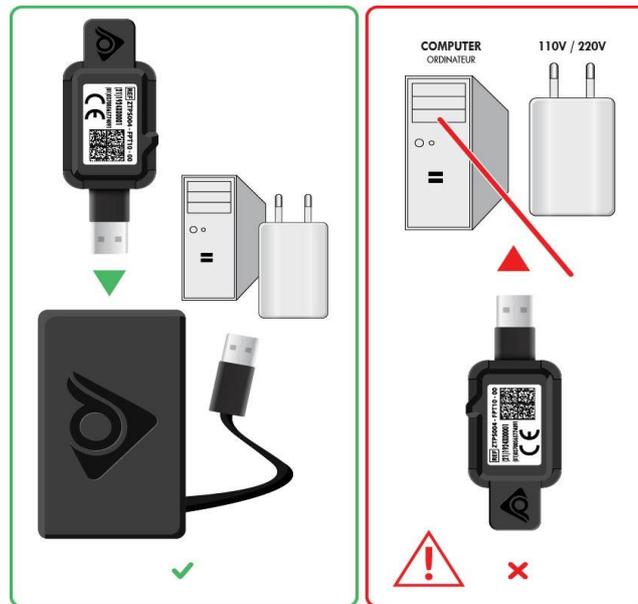

ATTENTION



N'oubliez pas de recharger les DSPods avant une période de non-utilisation prolongée pour éviter d'endommager la batterie.

Il est recommandé de charger les DSPods à des températures comprises entre 10°C (50°F) et 40°C (104°F) pour optimiser leur durée de vie

Comment savoir si mes DSPods sont complètement chargés ?

- Pendant la charge : la LED d'un DSPod en charge s'allume. Lorsque le voyant est éteint, cela signifie que le DSPod est complètement chargé.
- Sur l'application mobile : les niveaux de batterie sont affichés sur l'application. Vérifiez la carte correspondante à vos DSPods pour voir les niveaux. Si les pods ne sont pas affichés dans la liste des semelles, vous devez les coupler.

Que signifient les LED des DSPods ?

- Les voyants sont rouges : les DSPods sont en cours de chargement.
- Les voyants sont éteints :
 - Les DSPods sont branchés, ce qui signifie qu'ils sont complètement chargés.
 - Les DSPods ne sont pas chargés, ce qui signifie qu'ils sont en mode veille. Secouez-les simplement pour les faire sortir du mode veille.
- Les LED clignotent : les DSPods sont prêts à l'emploi.

Le Datamatrix de mon DSPod est effacé, que puis-je faire ?

Si votre Datamatrix est effacé contactez-nous à support@digitsolepro.com

Pour gagner du temps, veuillez nous envoyer une photo de vos DSPods et l'adresse e-mail que vous avez utilisé pour créer votre compte sur Digitsole® Pro.

Les DSPods sont-ils étanches ?

Concernant la norme CEI 60529 :2013, les DSPods sont IP56, ce qui signifie que les appareils peuvent être utilisés les jours de pluie et en marchant dans des flaques d'eau.

Puis-je me connecter à mes DSPods alors qu'un autre appareil Bluetooth est couplé avec mon téléphone ?

Vous pouvez connecter vos DSPods pendant qu'un autre appareil Bluetooth est couplé avec votre téléphone.

Puis-je avoir ce module seul ?

Vous avez besoin du système de base Digitsole® Pro pour ajouter le module Performance.

Puis-je utiliser les DSPods sans les semelles ?

Non, les DSPods doivent être utilisés dans les semelles pour permettre la collecte maximale de données et le traitement via les algorithmes brevetés pour fournir des résultats cohérents et fiables.

Comment nettoyer mes semelles ?

Il est recommandé d'effectuer les opérations suivantes régulièrement et avant la première utilisation :

- Nettoyer avec un désinfectant répondant aux caractéristiques suivantes :
 - Bactericide EN1276*, EN13727, EN13697*, EN14561 (dont SARM).
 - Tuberculocide sur Mycobacterium Terrae EN14348* et EN14563*.
 - Fongicide EN14562* (sur Aspergillus Fugimatus).
 - Levuricide EN1650, EN13697*, EN13624*, EN14562* sur Candida albicans.
 - Virucide EN14476 sur HBV, HCV, Adenovirus, Coronavirus, Norovirus, RSV, H1N1, HSV-1, Polyomavirus* et Rotavirus*.

*Sauf si très sale

- Nous vous recommandons les lingettes STERIMED pour l'EU et le produit STERICID S-3DM pour les US qui répondent à vos besoins et que vous pouvez vous procurer en contactant Digitsole : contact@digitsolepro.com
- Laisser sécher à l'air libre ou essuyer avec un chiffon propre, sec et non pelucheux avant réutilisation.

ATTENTION



- Ne pas utiliser de produits corrosifs, d'huile, d'acétone ou de produits à base de pétrole pour nettoyer le dispositif
- Ne pas mettre le dispositif dans la machine à laver, le sèche-linge, le sèche-mains ou tout autre équipement.
- Ne pas plonger le dispositif dans l'eau

Que faire en fin de vie du produit ?

Les composants électroniques et piles au lithium-ion sont soumises à des réglementations en matière de recyclage qui varient selon les pays et les régions. Afin de respecter des pratiques environnementales responsables, veuillez suivre la réglementation en vigueur dans votre région avant de vous débarrasser de ces semelles.

L'appareil doit donc être repris par votre fournisseur de soins de santé, distributeur ou fabricant.

Je n'arrive pas à connecter les DSPods, que puis-je faire ?

Assurez-vous que les DSPods sont chargés, débranchés du chargeur et non en mode veille.

En mode veille les LEDs rouges ne clignotent pas.

Pour vous assurer que les DSPods ne sont pas en veille, secouez-les pour les réveiller. Vous pouvez également les brancher et les débrancher.

Soyez sûr que vos DSPods ne soient pas connecter à un autre appareil.

Si le problème persiste, vous pouvez :

1. Fermer l'application,
2. Brancher vos DSPods,
3. Couper le Bluetooth au minimum 3 secondes,
4. Allumer le Bluetooth,
5. Ouvrir l'application
6. Débrancher vos DSPods,
7. Scanner à nouveau vos DSPods.

Je n'arrive pas à mettre à jour les DSPods, que puis-je faire ?

Assurez-vous que les DSPods sont chargés, débranchés du chargeur et non en mode veille. En mode veille les LEDs rouges ne clignotent pas.

Pour vous assurer que les DSPods ne sont pas en veille, secouez-les pour les réveiller. Vous pouvez également les brancher et les débrancher.

Soyez sûr que vos DSPods ne soient pas connecter à un autre appareil.

Si le problème persiste, vous pouvez :

1. Fermer l'application,
2. Brancher vos DSPods,
3. Couper le Bluetooth au minimum 3 secondes,
4. Allumer le Bluetooth,
5. Ouvrir l'application
6. Débrancher vos DSPods,
7. Ressayer de mettre à jour vos DSPods.

Quelle est la portée des DSPods ? Dois-je me tenir à côté du téléphone ?


Les DSPods communiquent avec l'appareil uniquement au lancement de l'acquisition et à la fin de celle-ci. Pendant ces deux périodes, les DSPods doivent être à une distance maximale de deux mètres du téléphone. Cependant, lors de l'acquisition, les DSPods conservent toutes les informations et les transmettent au téléphone à la fin de l'acquisition.

Interface Web

Comment créer un compte sur Digitsole® Pro ?


Si vous n'avez pas encore créé de compte Digitsole® Pro, inscrivez-vous via le lien suivant :

<https://app.digitsolepro.com/auth/sign-up>

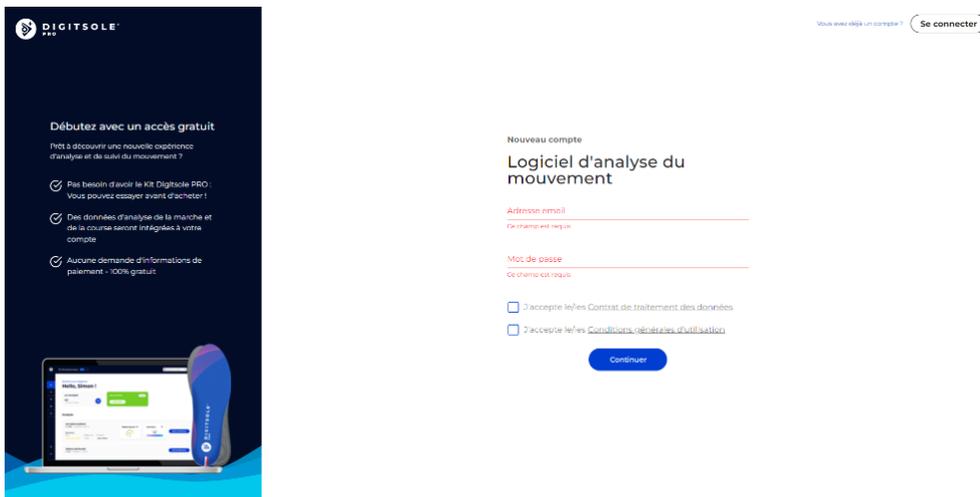

Entrez l'adresse email et le mot de passe que vous souhaitez utiliser pour votre compte Digitsole® Pro, acceptez le contrat de traitement de données après lecture de celui-ci.

Pour des raisons de sécurité, votre mot de passe doit contenir au moins huit caractères, dont au minimum un chiffre, une minuscule, une majuscule et un caractère spécial

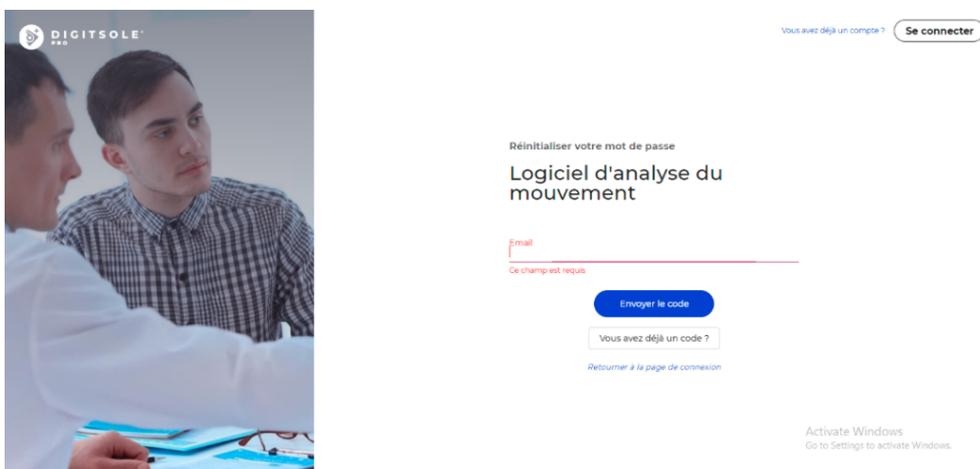

Vous recevez ensuite par mail un code permettant la confirmation de votre inscription. Veuillez l'inscrire dans le champ prévu à cet effet.

Entrez ensuite vos informations personnelles, afin de terminer la création de votre compte.

Comment activer le double facteur d'authentification ?

Pour activer la double authentification, cliquez en haut à droite sur l'onglet Votre compte



Cliquez ensuite sur Activer la double authentification




Scanner le QRCode à l'aide de votre application de double authentification (Google authenticator par exemple) et saisissez le code dans l'encart prévu à cet effet.



Comment se connecter à l'interface ?


Pour accéder à l'interface, assurez-vous d'avoir déjà créé votre compte sur l'interface web. Vous pouvez vous connecter à cette application en utilisant les mêmes informations d'identification. Connectez-vous via le lien suivant :

<https://app.digitsolepro.com/auth/sign-in>

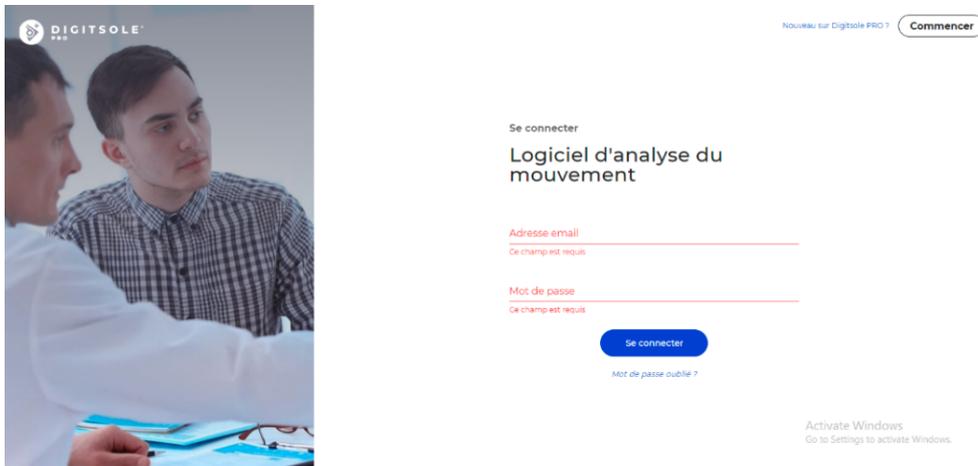


Pour vous connecter, entrez l'adresse e-mail et le mot de passe de votre compte.

Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur **Mot de passe oublié**, saisissez votre adresse e-mail dans le champ prévu à cet effet, puis cliquez sur **Envoyer le code**.

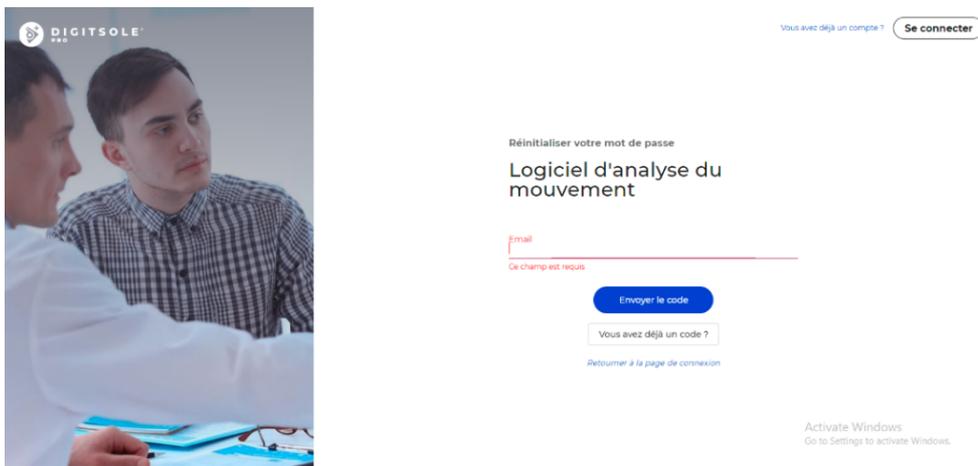

En plus de votre nouveau mot de passe, entrez le code que vous avez reçu par e-mail. Lorsque vous cliquez sur **Envoyer**, votre mot de passe sera modifié.

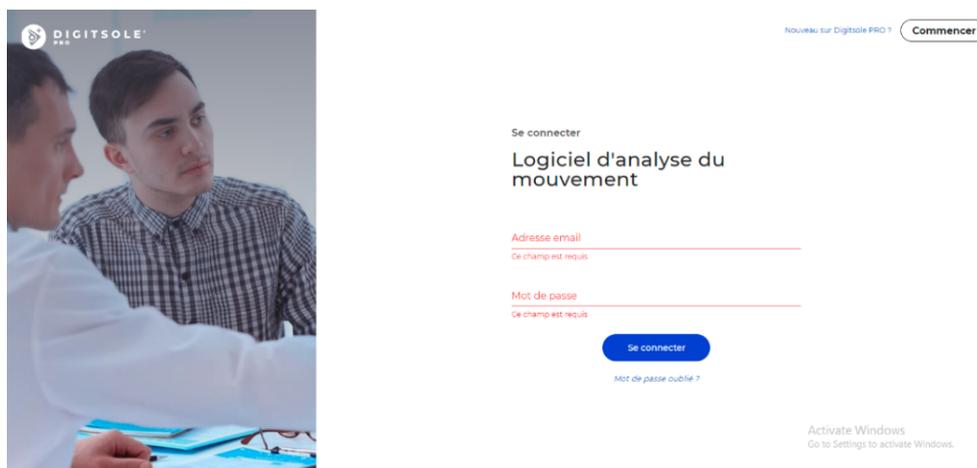

Vous passez ensuite à l'écran de connexion, où vous entrez votre adresse e-mail et votre nouveau mot de passe pour utiliser Digitsole® Pro

Comment modifier mes informations de praticien ?

Pour modifier vos informations professionnelles, rendez-vous sur le bouton **Votre compte** en haut à droite




Ensuite, pour modifier vos informations de praticien, cliquez sur l'icône Stylo.




Comment ajouter un patient ?

Sélectionnez l'onglet Patients, puis cliquez sur **Nouveau patient** en haut à droite.

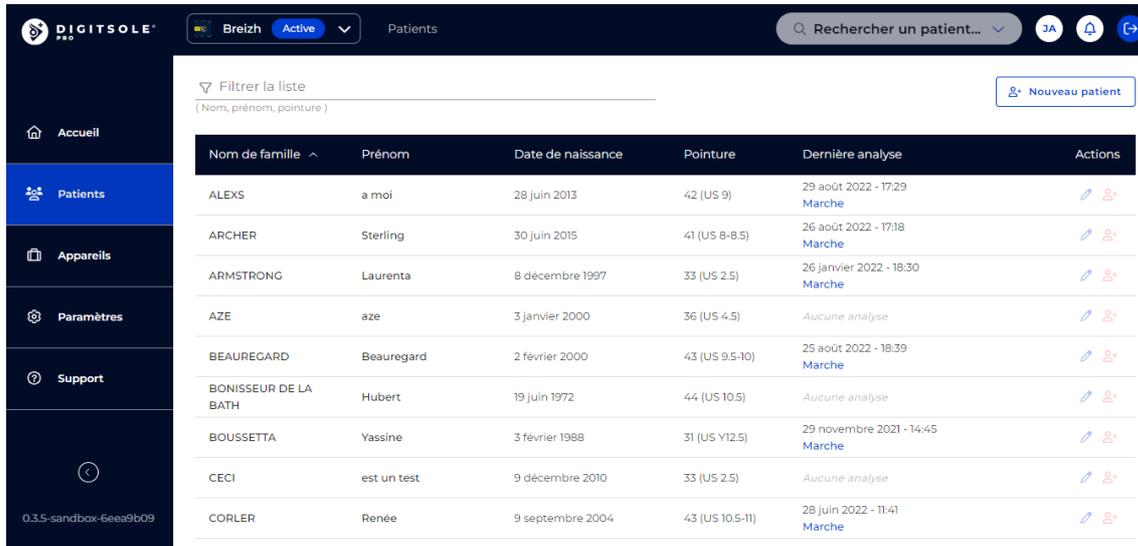

Nom de famille	Prénom	Date de naissance	Pointure	Dernière analyse	Actions
ALEXS	a moi	28 juin 2013	42 (US 9)	29 août 2022 - 17:29 Marche	 
ARCHER	Sterling	30 juin 2015	41 (US 8-8.5)	26 août 2022 - 17:38 Marche	 
ARMSTRONG	Laurenta	8 décembre 1997	33 (US 2.5)	26 janvier 2022 - 18:30 Marche	 
AZE	aze	3 janvier 2000	36 (US 4.5)	Aucune analyse	 
BEAUREGARD	Beauregard	2 février 2000	43 (US 9.5-10)	25 août 2022 - 18:39 Marche	 
BONISSEUR DE LA BATH	Hubert	19 juin 1972	44 (US 10.5)	Aucune analyse	 
BOUSSETTA	Yassine	3 février 1988	31 (US Y12.5)	29 novembre 2021 - 14:45 Marche	 
CECI	est un test	9 décembre 2010	33 (US 2.5)	Aucune analyse	 
CORLER	Renée	9 septembre 2004	43 (US 10.5-11)	28 juin 2022 - 11:41 Marche	 

Une nouvelle fenêtre s'ouvre, vous permettant de saisir les coordonnées de votre patient, son adresse, son mode de contact préféré, l'objet de la consultation, ainsi que ses éventuels antécédents et pathologies.

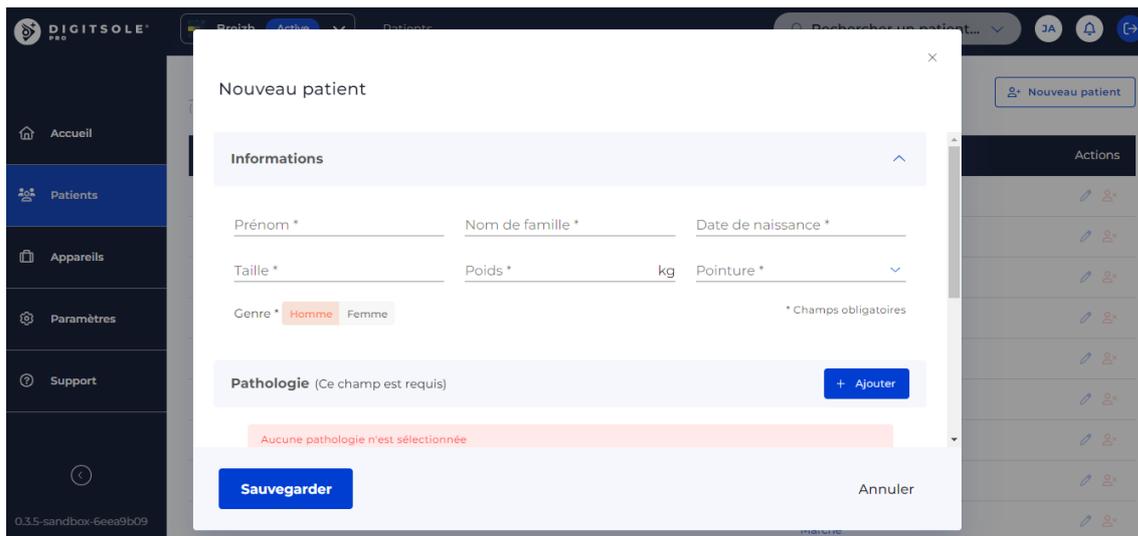

Nouveau patient

Informations

Prénom * Nom de famille * Date de naissance *

Taille * Poids * kg Pointure *

Genre * Homme Femme * Champs obligatoires

Pathologie (Ce champ est requis)

Aucune pathologie n'est sélectionnée

Les champs obligatoires sont indiqués par un astérisque (*) dans la section « Information » et dans la section « Pathologie ». Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Ajouter**.

NB : Si vous utilisez les unités impériales, pour avoir accès aux pointures homme ou femme, il est nécessaire de choisir au préalable le genre de votre patient

Comment modifier un patient ?

Pour modifier une fiche patient, cliquez sur l'onglet Patient, cliquez ensuite sur le patient désiré.

Pour modifier les informations personnelles du patient, son adresse et le moyen de contact, cliquez sur **Editer le patient**.

Pour la modification ou l'ajout de pathologie connue, motif de consultation et antécédents, en fonction des données déjà renseignées, vous aurez la possibilité de cliquer sur Editer pour modifier ces informations ou sur **Ajouter** pour en ajouter de nouveaux.

The screenshot shows the patient profile for YASSINE BOUSSETTA. The page includes a navigation sidebar on the left with options like Home, Patients, Equipment, Settings, and Support. The main content area is titled 'YASSINE BOUSSETTA' and has an 'Edit patient' button in the top right. Below the title, there are sections for 'Pathology' (with an 'Add +' button), 'Reasons for consultation' (with an 'Edit' button), and a 'Summary' section. The summary lists activities: 'Walking' (11/29/2021 02:48 PM), 'Running' (10/25/2021 10:16 PM), and 'Walking' (10/07/2021 11:57 AM). There are also two circular gauges for 'Cadence' (85) and 'Symmetry' (77), each with a 'SEE IN DETAILS' button. At the bottom, there are four more 'SEE IN DETAILS' buttons corresponding to the walking activities.

Comment supprimer un patient ?

Pour supprimer un patient, cliquez sur l'onglet Patient, à droite de votre écran, sur la ligne correspondant au patient que vous souhaitez supprimer cliquer sur le logo rouge Supprimer le patient.

A noter : Cette action est irréversible

The screenshot shows the patient list page. It features a search bar at the top right and a 'New patient' button. Below the search bar is a filter section and a table of patients. The table has columns for 'Last name', 'First name', 'Birth date', 'Shoe size', 'Latest analysis', and 'Actions'. The 'Actions' column contains a red trash icon for each patient. The patients listed are ARMSTRONG, BERTRAND, BEAUREGARD, BONSIEUR DE LA BATH, and BOUSSETTA. At the bottom right, there is a pagination control showing 'Items per page: 5' and '1.5 of 49'.

Last name	First name	Birth date	Shoe size	Latest analysis	Actions
ARMSTRONG	Laurenta	December 8, 1997	40	January 26, 2022 - 19:30 Walking	 
BERTRAND	Jean	January 4, 2000	37	No analysis yet	 
BEAUREGARD	Beauregard	February 2, 2000	43	June 23, 2022 - 19:03 Walking	 
BONSIEUR DE LA BATH	Hubert	June 19, 1972	44	No analysis yet	 
BOUSSETTA	Yassine	February 3, 1988	39	November 29, 2021 - 14:45 Walking	 


Comment rechercher un patient ?

Sur la page d'Accueil, en haut à droite dans la section rechercher un patient tapez le nom et/ou le prénom du patient recherché et cliquez ensuite sur son nom pour accéder à sa fiche patient.





Comment créer un filtre personnalisé ?

Sur la page de résultats d'analyse, en haut à droite vous pouvez choisir le type de vue que vous souhaitez avoir : Général ou Détails, puis : Neurologique, traumatologique, réathlétisation ou par défaut.

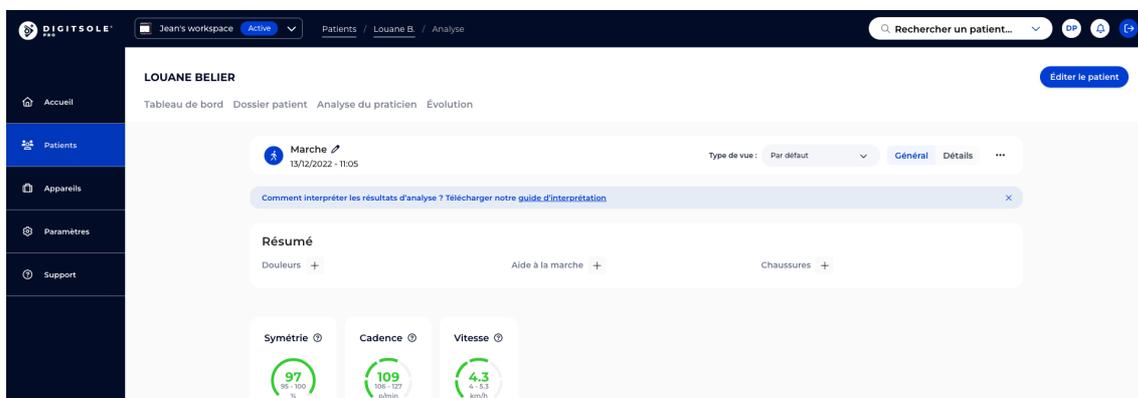

Vous pouvez également choisir de personnaliser votre filtre en cliquant sur Créer mon filtre personnalisé. En le créant, il vous sera possible de choisir les paramètres que vous souhaitez afficher et de lui donner le nom que vous souhaitez.

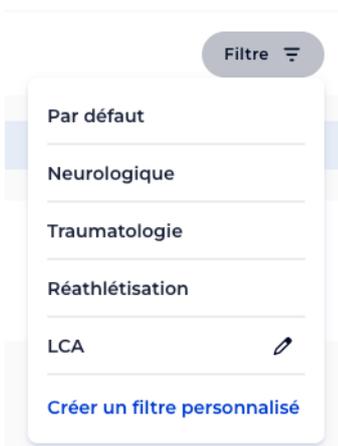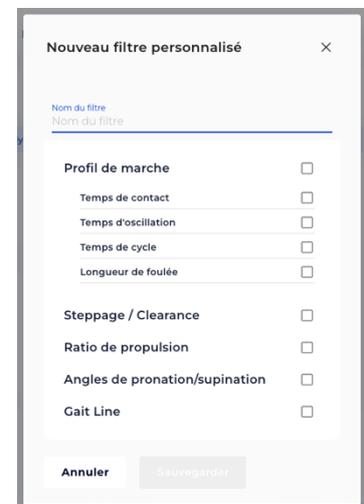

Une fois vos filtres personnalisés créés, en cliquant sur l'icône **Stylo**, vous pourrez le renommer, le modifier, et le supprimer.

Comment ajouter des commentaires sur un rapport ou une acquisition ?

Dans les résultats d'analyse d'une activité, en bas des résultats, vous pouvez écrire des commentaires. Ces commentaires inscrits dans cette partie seront sauvegardés. Vous pourrez les retrouver à tout moment avec les résultats de cette activité.

The screenshot shows the DIGITSOLE software interface for patient analysis. The top navigation bar includes the user's name 'Breizh Active' and a search bar. The main content area is titled 'A MOI ALEXS' and features a 'Tableau de bord' (Dashboard) with gait analysis graphs. A 'Mise en charge' (Load) section contains a table with the following data:

Paramètre	Valeur
Durée de mise en charge adaptée à gauche et à droite	47%
Durée d'appui unipodal adaptée à gauche et à droite	49%
Durée de propulsion adaptée à gauche et à droite	16%
Durée de propulsion adaptée à gauche et à droite	15%

Below the dashboard are two columns: 'Commentaires' (Comments) with a text input field, and 'Interprétations' (Interpretations) with a text box containing the following text: 'Il ne semble y avoir ni déséquilibre de la durée de cycle, ni compensation de la durée de contact. Les pas sont donc symétriques. Déroulé asymétrique du pas.' A 'PLANTAIRE' diagram is also visible on the right side of the dashboard.

Pour laisser un commentaire dans le rapport, une fois celui-ci exporté, vous pouvez laisser un commentaire dans les parties prévues à ces effets. Les commentaires inscrits à cet endroit, ne seront pas conservés sur l'interface.

Vous avez toutefois la possibilité de les conserver en imprimant le rapport, l'envoyant par email au patient et en l'enregistrant en PDF.

The screenshot shows the DIGITSOLE software interface for patient analysis, specifically the print/export options. The top navigation bar includes the user's name 'Breizh Active' and a search bar. The main content area is titled 'A MOI ALEXS' and features a 'Tableau de bord' (Dashboard) with gait analysis graphs. A 'Mise en charge' (Load) section contains a table with the following data:

Paramètre	Valeur
Durée de mise en charge adaptée à gauche et à droite	47%
Durée d'appui unipodal adaptée à gauche et à droite	49%
Durée de propulsion adaptée à gauche et à droite	16%
Durée de propulsion adaptée à gauche et à droite	15%


Below the dashboard are two columns: 'Commentaires' (Comments) with a text input field, and 'Interprétations' (Interpretations) with a text box containing the following text: 'Il ne semble y avoir ni déséquilibre de la durée de cycle, ni compensation de la durée de contact. Les pas sont donc symétriques. Déroulé asymétrique du pas.' A 'PLANTAIRE' diagram is also visible on the right side of the dashboard. The bottom of the screenshot shows the print/export options, including 'Imprimer' (Print) and 'Envoyer par email' (Send by email).

Comment comparer des acquisitions ?


Cliquez sur l'onglet **Patients** puis sur la ligne du patient désiré.

Vous êtes à présent sur la fiche du patient.


Cliquez sur l'analyse que vous souhaitez comparer

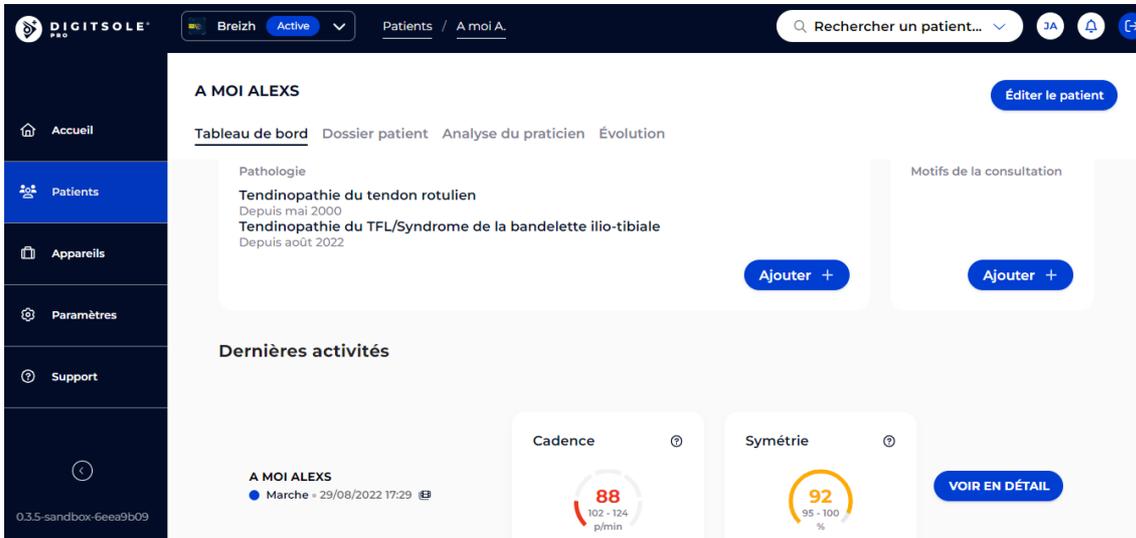


Une fois l'analyse ouverte, cliquez sur les ... en haut à droite puis cliquez sur **Comparer**.

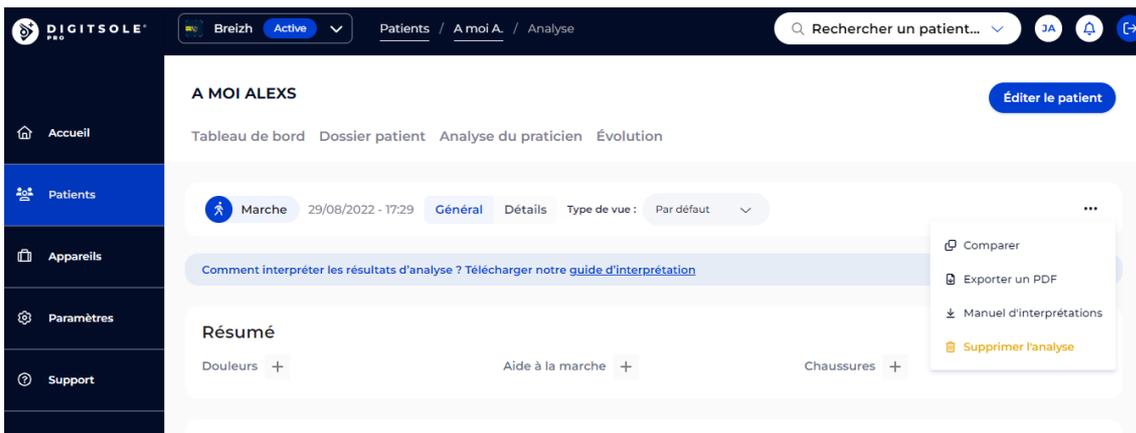

Sélectionnez ensuite l'analyse avec laquelle vous souhaitez la comparer.

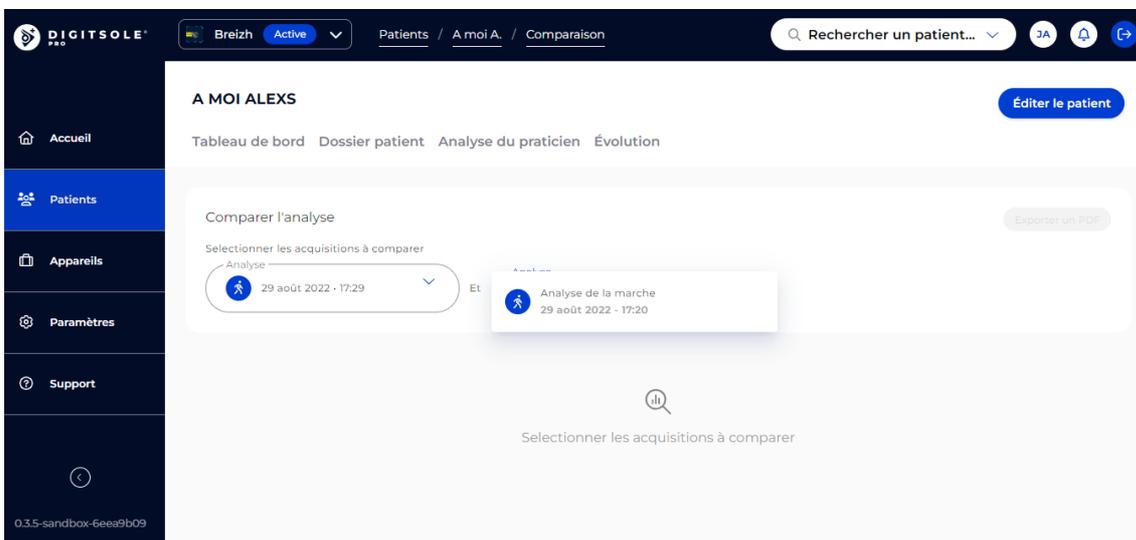


Comment renommer une acquisition ?

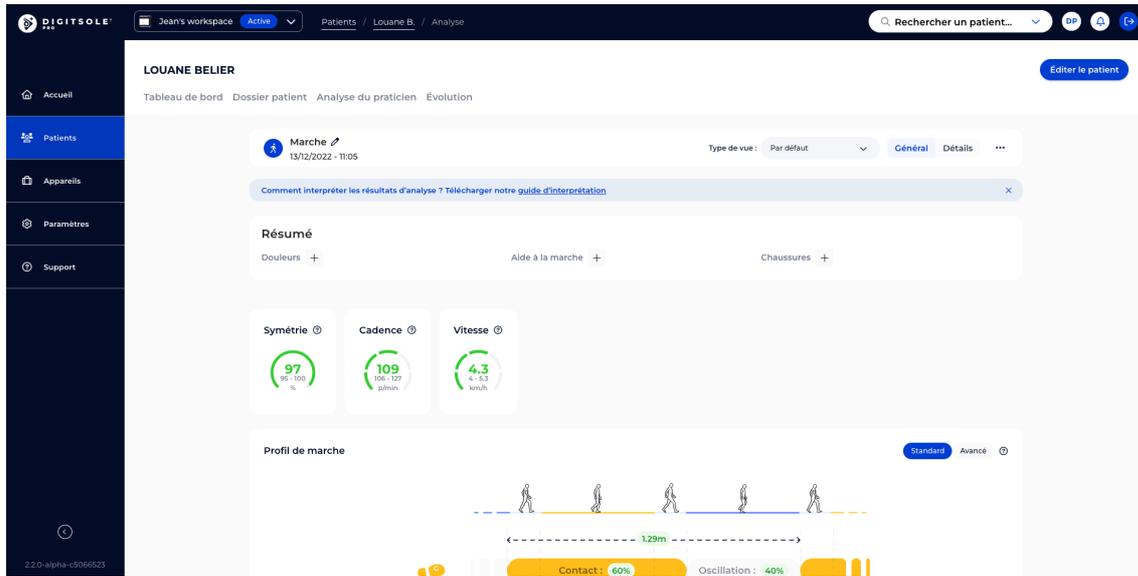

Depuis l'onglet « Analyse du praticien » sur la fiche patient ou directement depuis les résultats de l'analyse, il vous est possible de renommer votre analyse.

Pour cela, cliquez sur l'icône **Stylo**, renommez l'analyse puis cliquez sur Sauvegarder. Votre analyse est maintenant renommée.

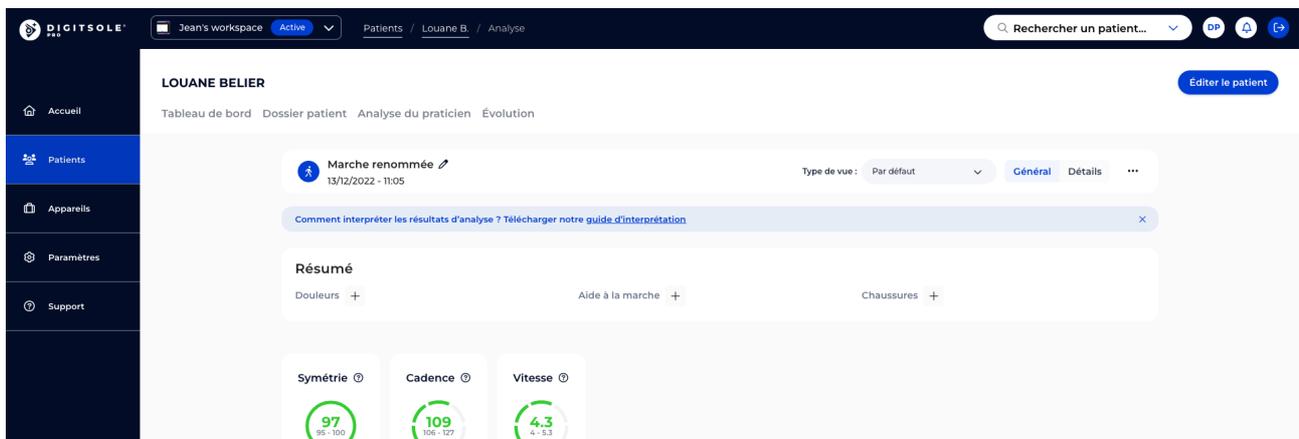


Comment supprimer une acquisition ?

Cliquez sur l'onglet **Patients** puis sur la ligne du patient désiré.

Vous êtes à présent sur la fiche du patient.


A droite se trouve la section "Analyses".

Cliquez sur l'analyse que vous souhaitez supprimer, cliquez sur ... et choisissez **Supprimer l'analyse**.

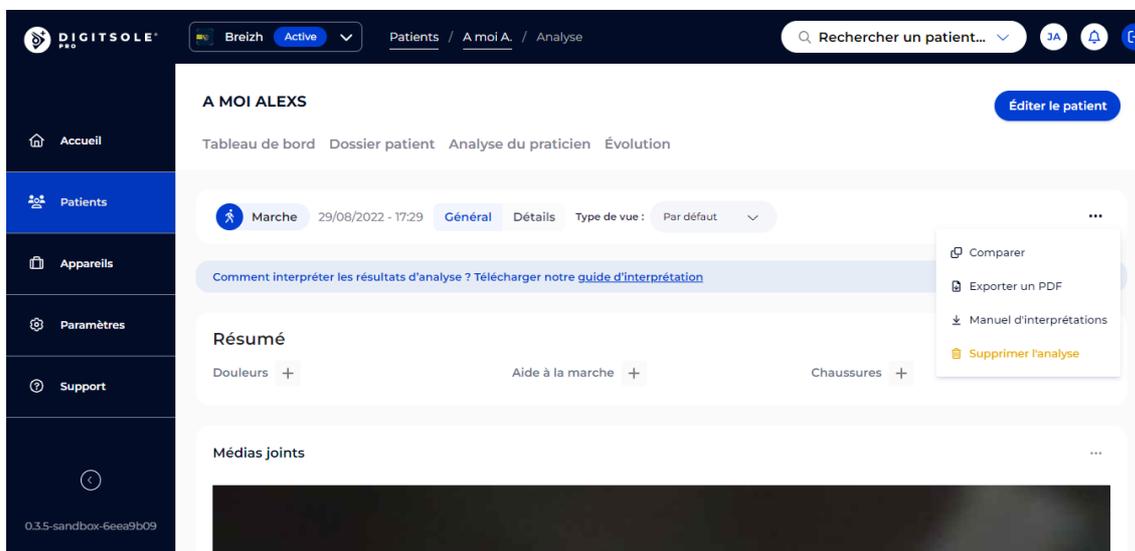

Une fenêtre s'ouvre pour valider votre demande de suppression.

Si vous cliquez sur Supprimer, l'acquisition sera supprimée définitivement.

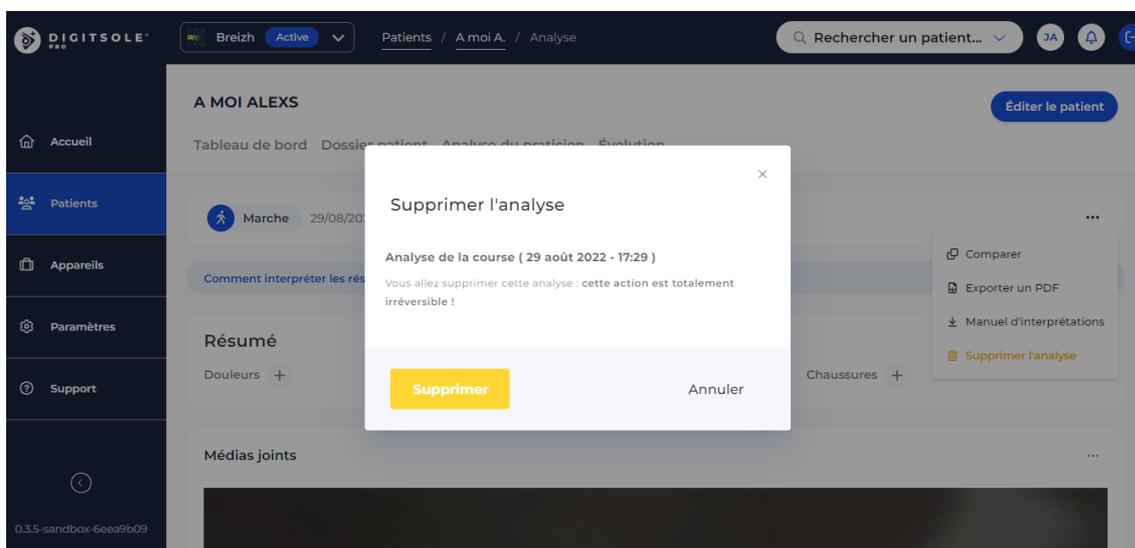


Comment voir les résultats d'analyse ?

Cliquez sur l'onglet **Patients** puis sur la ligne du patient désiré.


Vous êtes à présent sur la fiche du patient.

Cliquez sur l'analyse à laquelle vous voulez accéder

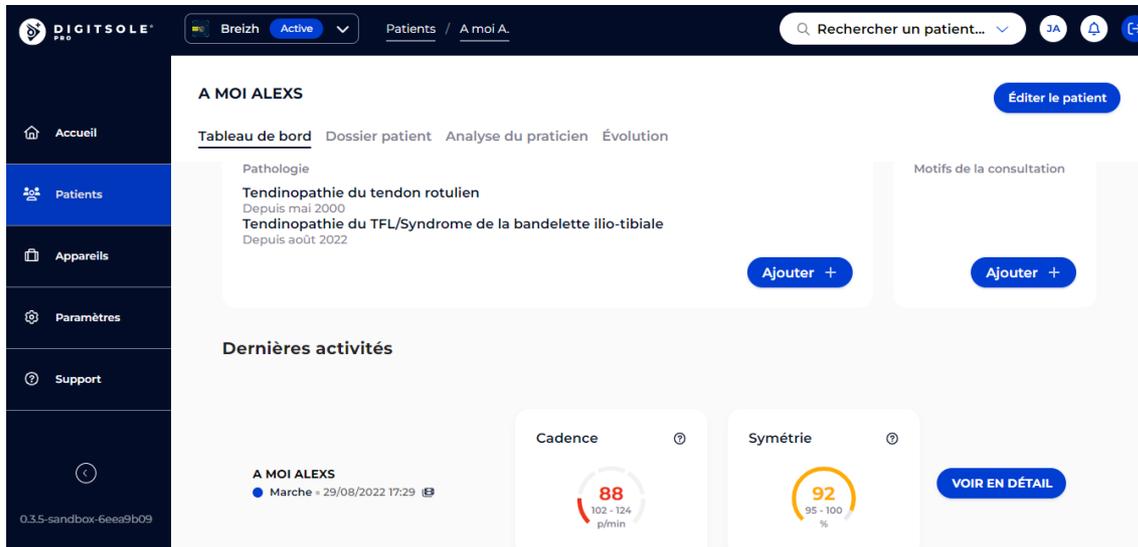

Vous arrivez ensuite sur l'analyse de données de votre patient.

En haut à droite vous pouvez choisir le type de vue que vous souhaitez avoir : Générale ou Détails, puis : Neurologique, traumatologie, réathlétisation, par défaut ou personnalisée

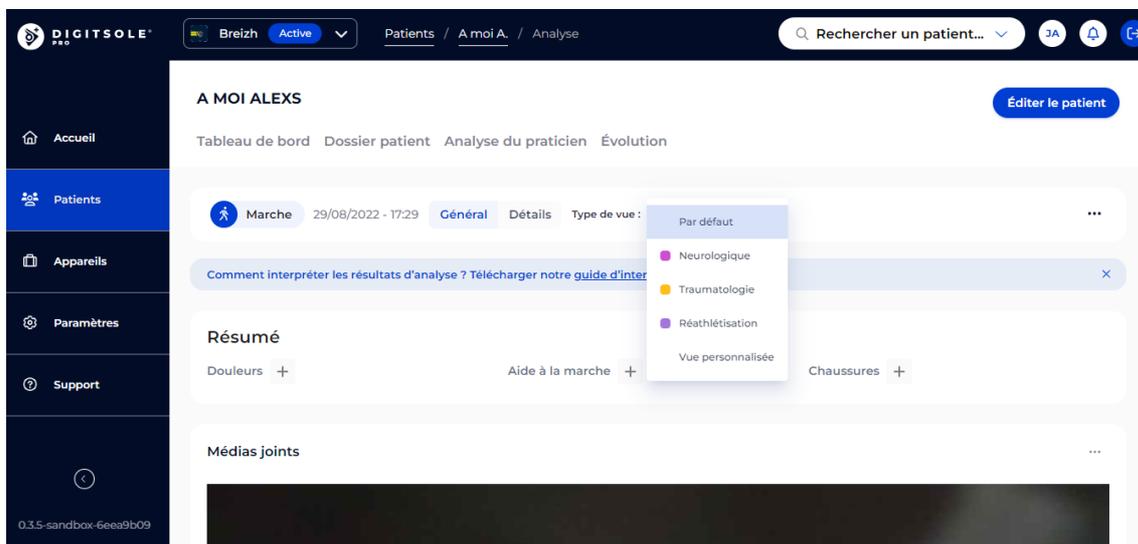

Comment supprimer mon compte ?

Pour supprimer votre compte, contactez-nous à l'adresse email suivante : support@digitsolepro.com

Réglages

Comment changer de langue ?

- Depuis l'interface Web : Dans la section des paramètres, vous pouvez modifier la langue de l'interface.
- Depuis l'application : vous ne pouvez pas modifier la langue de l'application. La langue de l'application dépend de la langue dans laquelle votre téléphone est configuré

Comment changer de système d'unités ?

- Depuis l'interface Web : Dans la section des paramètres, vous pouvez modifier le système d'unités (métrique ou impérial).
- Depuis l'application : dans la section des paramètres, vous pouvez modifier le système d'unités.

Comment voir mes fonctionnalités ?


Dans la section Fonctionnalités, vous pouvez voir les fonctionnalités auxquelles vous êtes abonné ou non.

The screenshot displays the 'Fonctionnalités' (Features) section of the application. It contains four feature cards, each with a title, a description, an 'Active' status indicator, and an 'Information' box with a warning message: 'Les données de ces modules ne sont pas des données médicales'.

- Course**: Analysez la course de vos patients avec ce module. Status: Active.
- Réhabilitation**: Mesurez la performance ou le progrès de vos patients pendant sa rééducation en analysant 4 tests de saut standards. Status: Active.
- Vidéo**: Capturez des vidéos pendant vos analyses avec votre application. Status: Active.
- Marche**: Analysez la marche de vos patients en quelques minutes. Status: Active.


Comment ajouter une personne dans mon espace de travail ?

1. Connectez-vous à votre compte sur l'interface web Digitsole Pro.
2. Allez dans Paramètres.

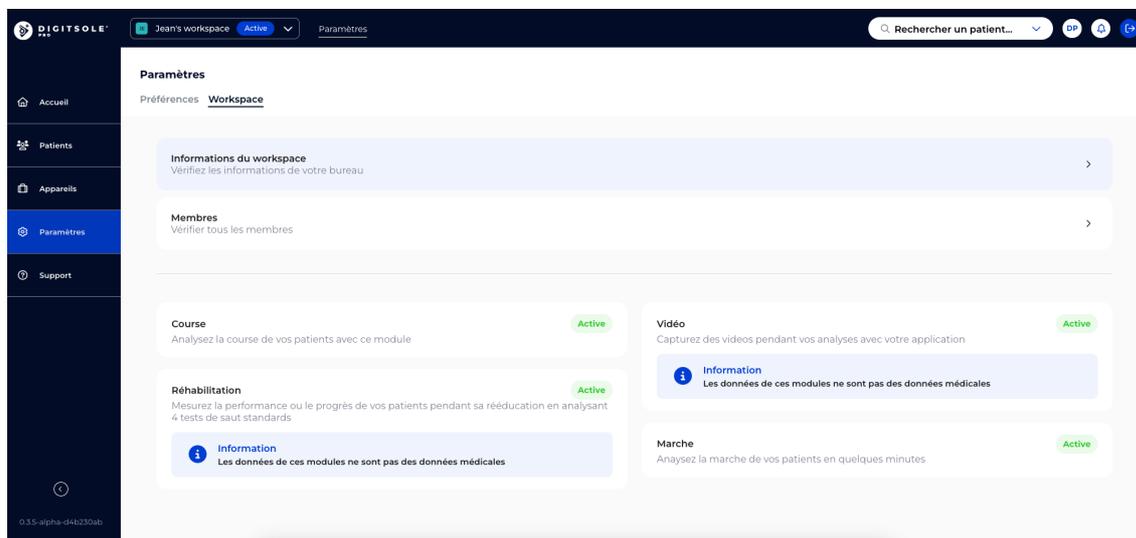


3. Allez dans Workspace.
4. Cliquez sur Membres
5. Cliquez sur **Invitez un nouveau membre**
Entrez l'adresse email de l'utilisateur que vous souhaitez ajouter.


A noter : L'utilisateur (membre) que vous voulez ajouter à votre espace de travail doit avoir un compte Digitsole® Pro. Si ce n'est pas le cas, créez un compte en suivant le processus sur ce lien : [S'inscrire \(Digitsole Pro\)](#)

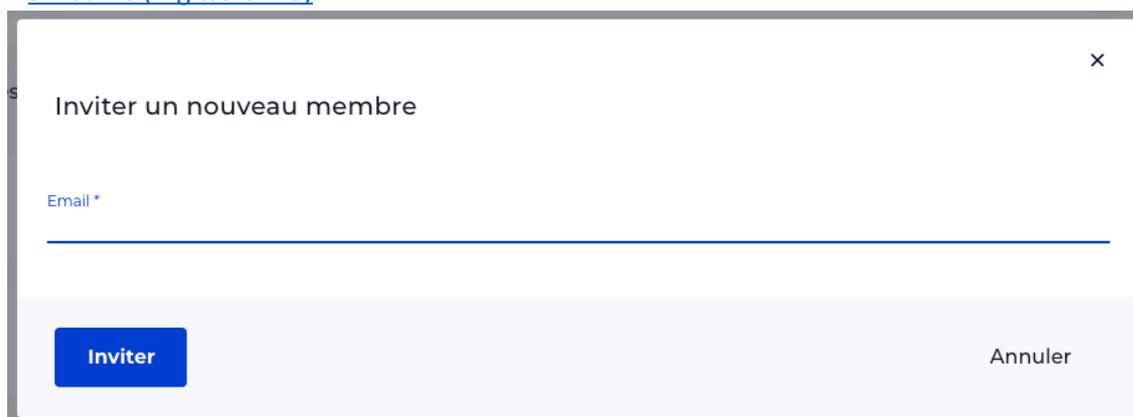

L'utilisateur ajouté recevra un mail d'invitation. Il devra cliquer sur Accepter l'invitation, puis se connecter à son compte pour finaliser le processus. (Vérifiez les courriers indésirables si l'email n'est pas reçu).

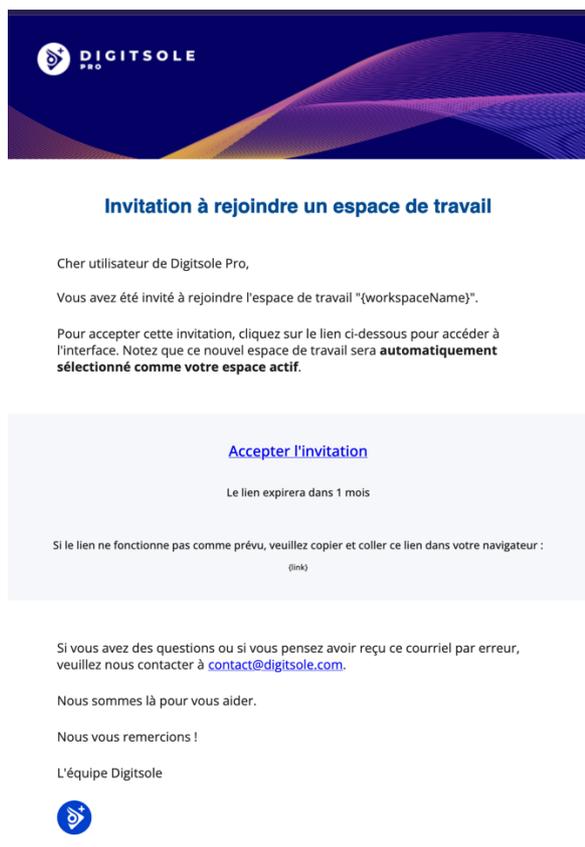

Les utilisateurs ne verront que les patients de leur propre espace de travail lorsqu'ils utiliseront le produit. Si vous avez accès à plusieurs espaces de travail, vous pouvez facilement passer de l'un à l'autre en sélectionnant l'espace de travail souhaité dans la barre en haut à gauche de votre écran.

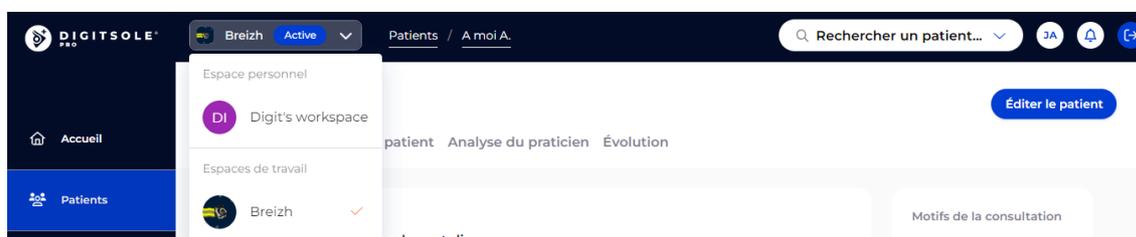

Sécurité

Comment puis-je être sûr que l'interface Web est sécurisée?

Vérifiez la barre d'adresse de votre navigateur : un petit cadenas devant l'adresse de l'interface vous indiquera que les communications sont cryptées avec un certificat SSL.

Que faire si l'URL est bloquée par mon antivirus ?

Lors de la configuration, si votre URL est bloquée, rendez-vous simplement dans les paramètres de votre antivirus, et débloquent-la.

PDF

Que dois-je faire si j'ai des difficultés avec l'exportation PDF ?

Nous vous conseillons d'utiliser Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari ou la dernière version de Microsoft Edge.

Comment envoyer le rapport au patient par email ?

La seule façon d'envoyer le rapport directement au patient est de cliquer sur Imprimer mais au lieu de sélectionner votre imprimante, choisissez "Enregistrer au format PDF".

Vous pourrez ensuite envoyer le PDF par email à votre patient en pièce jointe.

Comment générer un rapport ?

Cliquez sur l'onglet **Patients** puis sur la ligne du patient désiré.

Vous êtes à présent sur la fiche du patient.


Cliquez sur l'analyse à laquelle vous voulez accéder.

The screenshot shows the patient dashboard for 'A MOI ALEXS'. The top navigation bar includes the DIGITSOLE logo, a dropdown menu for 'Breizh' (Active), and the breadcrumb 'Patients / A moi A.'. A search bar contains 'Rechercher un patient...'. The left sidebar has menu items: Accueil, Patients (selected), Appareils, Paramètres, and Support. The main content area shows the patient's name 'A MOI ALEXS' with an 'Éditer le patient' button. Below this are tabs for 'Tableau de bord', 'Dossier patient', 'Analyse du praticien', and 'Évolution'. The 'Tableau de bord' is active, displaying two conditions: 'Tendinopathie du tendon rotulien' (since May 2000) and 'Tendinopathie du TFL/Syndrome de la bandelette ilio-tibiale' (since August 2022), each with an 'Ajouter +' button. A 'Dernières activités' section shows two activity cards: 'Cadence' (88 p/min, range 102-124) and 'Symétrie' (92%, range 95-100%), both with 'VOIR EN DÉTAIL' buttons. The bottom left corner shows a version number '0.3.5-sandbox-66ea9b09'.


Une fois l'analyse ouverte, cliquez sur les ... en haut à droite puis cliquez sur Exporter un PDF.

The screenshot shows the analysis report for 'A MOI ALEXS'. The breadcrumb is 'Patients / A moi A. / Analyse'. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main content area shows the patient's name 'A MOI ALEXS' with an 'Éditer le patient' button. Below this are tabs for 'Tableau de bord', 'Dossier patient', 'Analyse du praticien', and 'Évolution'. The 'Analyse du praticien' tab is active, showing a specific activity: 'Marche' on '29/08/2022 - 17:29'. There are buttons for 'Général', 'Détails', and a 'Type de vue' dropdown set to 'Par défaut'. A three-dot menu is visible in the top right corner of the activity card. Below the activity card, there is a text prompt: 'Comment interpréter les résultats d'analyse ? Téléchargez notre guide d'interprétation'. A 'Résumé' section is partially visible with expandable items: 'Douleurs +', 'Aide à la marche +', and 'Chaussures +'. A context menu is open over the three-dot menu, listing options: 'Comparer', 'Exporter un PDF', 'Manuel d'interprétations', and 'Supprimer l'analyse'.

La page de l'export de l'analyse s'ouvre.

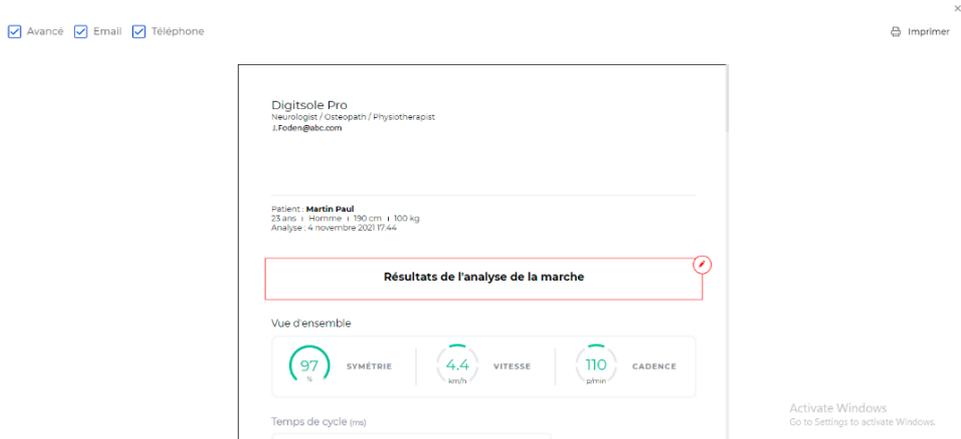

Si vous souhaitez avoir plus de détails sur l'export d'une analyse de course, il vous suffit de sélectionner deux points sur le graphique de l'onglet détails comme ci-dessous :

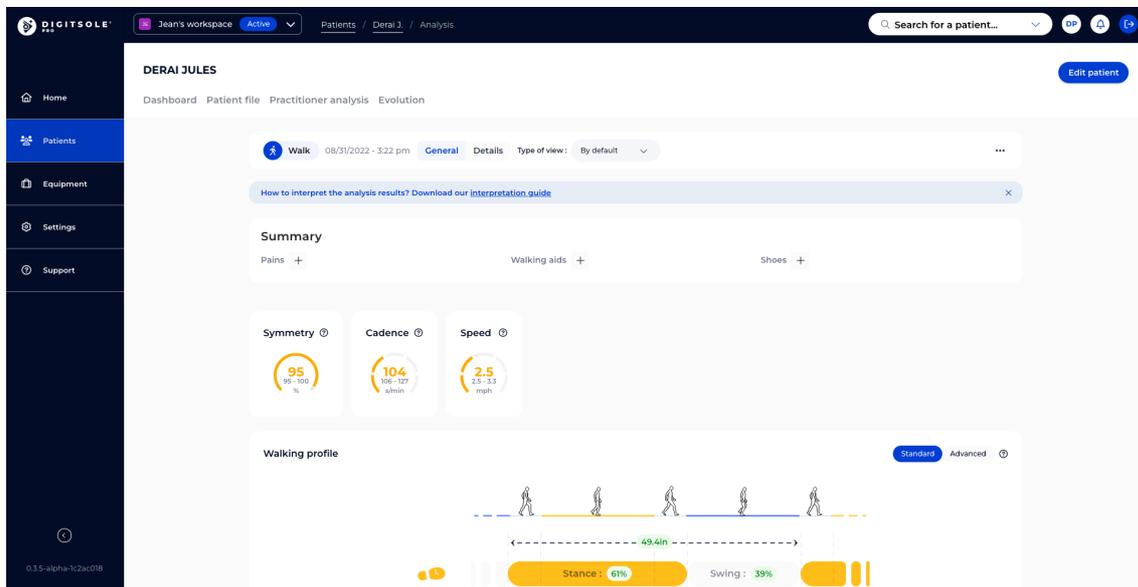

Vous pouvez ensuite cliquer sur **Exporter un PDF**, comme précédemment la page de l'export de l'analyse s'ouvre.

En cochant la case détails vous aurez accès à un PDF plus détaillé comprenant la comparaison des deux points que vous avez sélectionné précédemment.



Comment générer un rapport de comparaison ?

Cliquez sur l'onglet **Patients** puis sur la ligne du patient désiré.

Vous êtes à présent sur la fiche du patient.


Cliquez sur l'analyse à laquelle vous voulez accéder.

The screenshot shows the patient dashboard for YASSINE BOUSSETTA. The top navigation bar includes the DIGITSOLE logo, a dropdown menu for 'Breizh Active', and the patient name 'Yassine B.'. A search bar and utility icons are on the right. The left sidebar contains navigation options: Accueil, Patients (selected), Appareils, Paramètres, and Support. The main content area displays the patient's name and an 'Éditer le patient' button. Below this, there are tabs for 'Tableau de bord', 'Dossier patient', 'Analyse du praticien', and 'Évolution'. The 'Tableau de bord' tab is active, showing a 'Pathologie' section with 'Tendinopathie du Tibial antérieur' (since August 2022) and a 'Motifs de la consultation' section with 'testretdrgr'. A 'Dernières activités' section shows a recent walk on 29/11/2021 at 14:45. Below this, a 'Résumé' section lists 'Douleur' (Right Calf - 2/10), 'Aide à la marche' (1 cane), and 'Chaussures' (Rigidity: Soft). Metrics for 'Cadence' (85) and 'Symétrie' (77) are also visible, along with a 'VOIR EN DÉTAIL' button.

Une fois l'analyse ouverte, cliquez sur les ... en haut à droite puis cliquez sur **Comparer**.

The screenshot shows the analysis details page for YASSINE BOUSSETTA. The top navigation bar is similar to the previous screenshot, but the patient name is 'Yassine B.' and the page title is 'Analyse'. The left sidebar is the same. The main content area shows the patient's name and an 'Éditer le patient' button. Below this, there are tabs for 'Tableau de bord', 'Dossier patient', 'Analyse du praticien', and 'Évolution'. The 'Analyse du praticien' tab is active, showing a walk on 29/11/2021 at 14:45. A dropdown menu is open, showing options: 'Comparer', 'Exporter un PDF', 'Manuel d'interprétations', and 'Supprimer l'analyse'. The 'Résumé' section lists 'Douleurs' (Right Calf - 2/10), 'Aide à la marche' (1 cane, 2 canes, 1 rollator), and 'Chaussures' (Rigidity: Soft). Metrics for 'Symétrie', 'Cadence', and 'Vitesse' are also visible.

Sélectionnez ensuite l'analyse avec laquelle vous souhaitez la comparer.

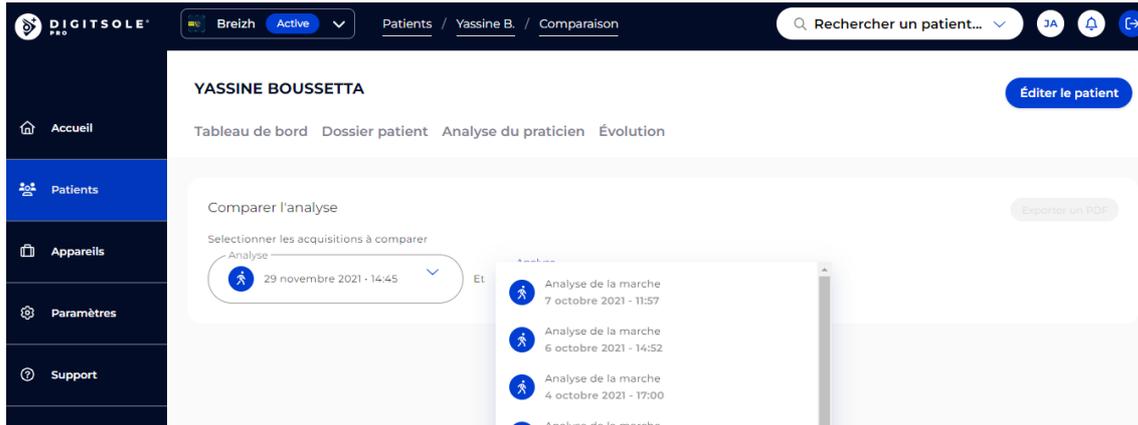

Cliquez ensuite sur **Exporter un PDF**.
La page de l'export de l'analyse s'ouvre.

Avancé Email Téléphone

Imprimer



Comment masquer certaines informations sur le rapport ?

Une fois l'exportation de votre analyse terminée, vous pouvez :

- Cochez la case "Avancé" pour générer un rapport plus avancé
- Afficher ou non vos informations docteur (e-mail, numéro de téléphone et logo) en cochant ou non les cases correspondantes.
- Afficher ou non les informations de votre patient (nom, âge, genre, taille et poids) en cochant ou non les cases correspondantes.


Informations docteur > Informations patient > Avancé

Exporter



Comment ajouter mon logo à un rapport ?


Depuis l'onglet Workspace de la section Paramètres, vous pouvez ajouter un logo à votre rapport.

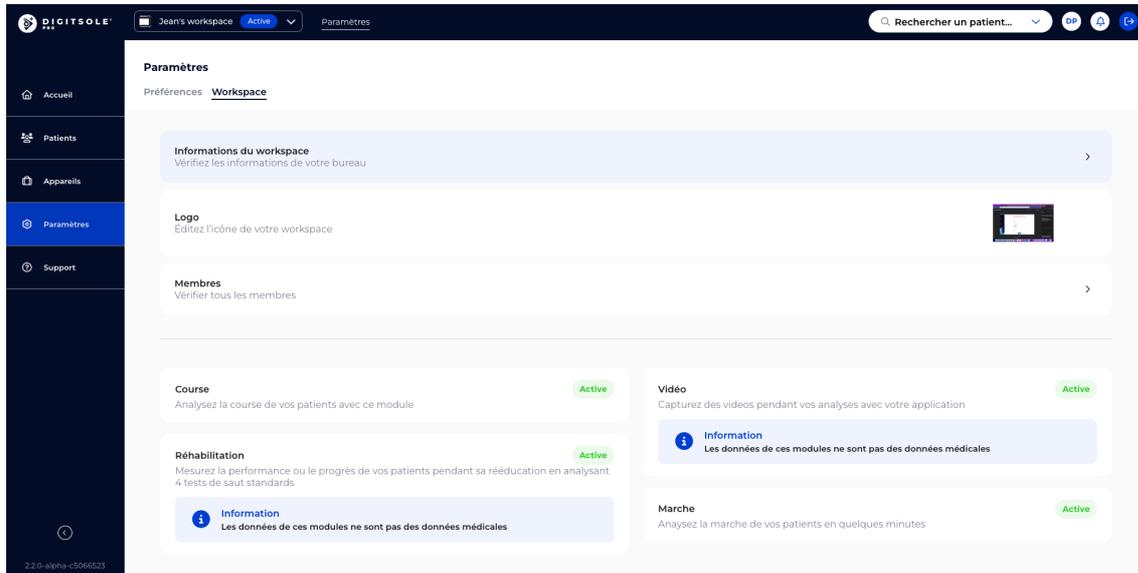

Dans la section « Logo », vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer votre logo. Celui-ci apparaîtra sur les exports des résultats d'analyses de vos patients.

Comment imprimer un rapport ?

Lorsque votre exportation d'analyse est terminée, vous pouvez imprimer le rapport en cliquant sur le bouton Imprimer en haut à droite de l'écran.

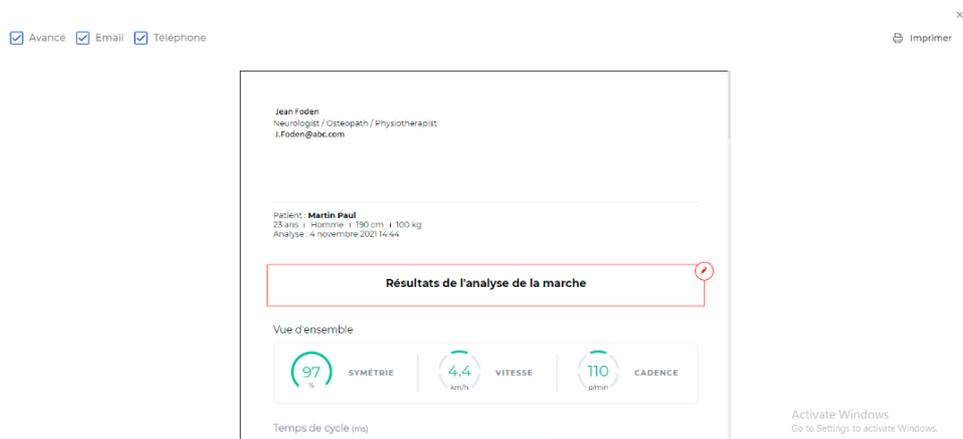


Acquisition

Où puis-je trouver les manuels d'interprétation de la marche et de la course ?

Cliquez sur une activité de marche ou de course.

En haut de l'analyse d'activité, cliquez sur les trois petits points puis sur Manuel d'interprétations.

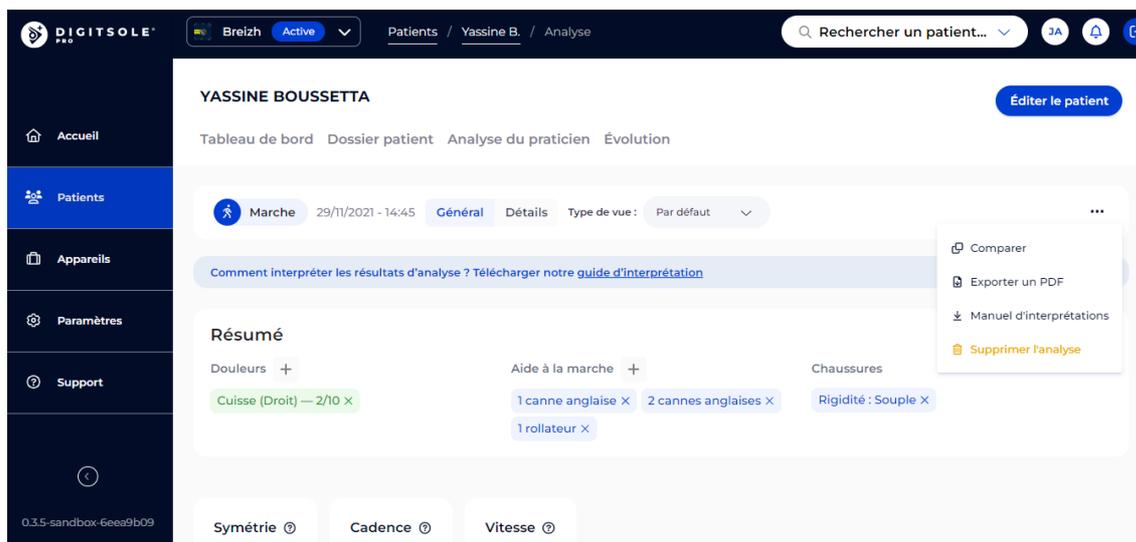

En cliquant sur **Manuel d'interprétations** via une analyse de marche, vous pouvez télécharger le manuel de marche.

En cliquant sur **Manuel d'interprétations** via une analyse de course, vous pouvez télécharger le manuel de course.

Pourquoi n'ai-je pas assez de pas à la fin de mon activité ?

- Assurez-vous de placer les DSPods dans la bonne position dans les semelles. (Voir : Comment insérer les DSPods dans les semelles Digitsole® Pro ?)
- Assurez-vous de rester immobile pendant la phase d'initialisation.
- Dans l'analyse de la marche, assurez-vous d'avoir fait plus de 20 pas lors de l'acquisition.
- Dans l'analyse de course, assurez-vous de courir à une vitesse supérieure à 8 km/h.
- Si le problème réapparaît, veuillez nous contacter et nous envoyer le **rapport d'erreur**.

Quelle est la vitesse de course minimale ?

Nous vous conseillons de courir à une vitesse minimale de 8 km/h.

Quelle est la vitesse de marche minimale ?


Nous vous conseillons de marche à une vitesse minimale de 1 km/h.

Quelle est la durée minimale d'une acquisition ?

Nous vous conseillons de réaliser des acquisitions de minimum 1 minute 30.


Comment démarrer et arrêter une analyse ?

Pour démarrer une acquisition, vous devez utiliser l'application sur votre téléphone.

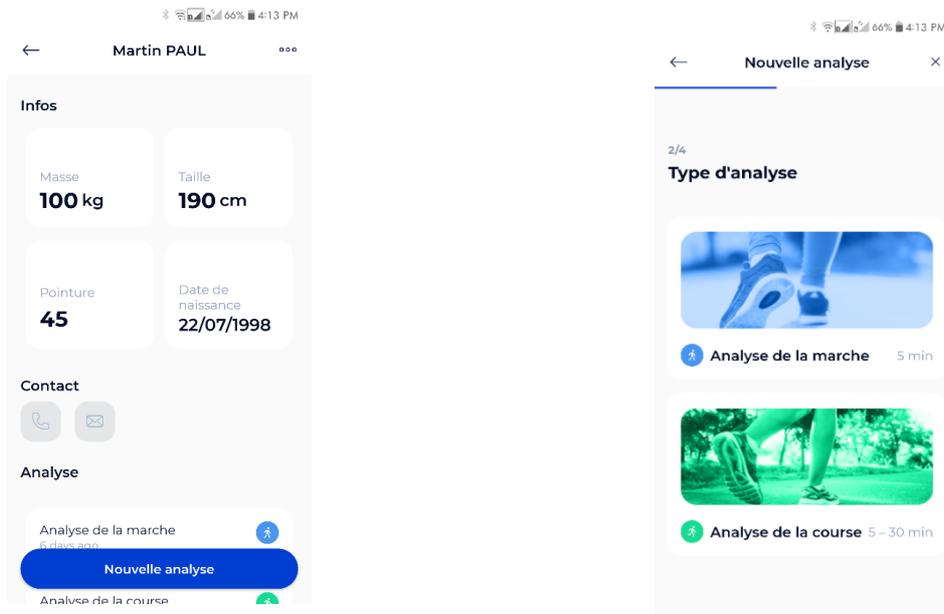


1 - Une fois votre patient créé et vos DSPods ajoutés à votre compte, rendez-vous sur la fiche de votre patient. Cliquez sur le bouton **Nouvelle analyse**.

2 - Puis sélectionnez le type d'analyse que vous souhaitez réaliser.

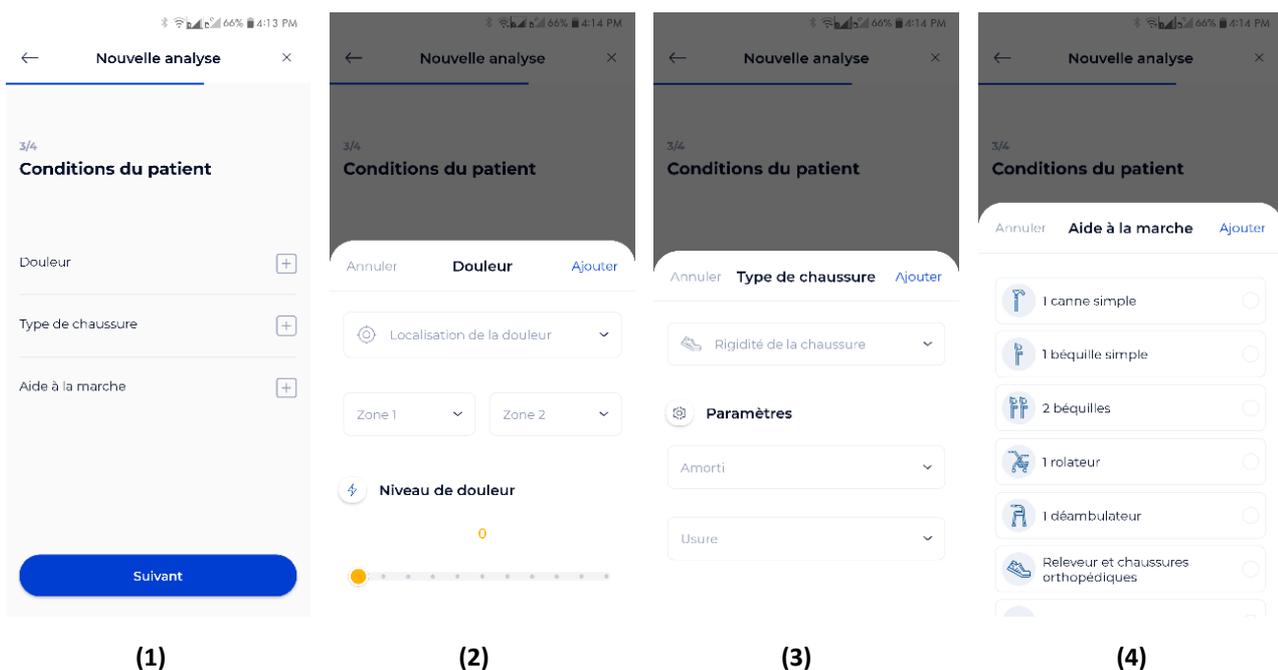

3 -Vous pouvez ensuite ajouter des informations complémentaires sur votre patient via le menu **ci-dessus. (1)**


- Dans l'onglet **Douleur (2)**, vous pouvez ajouter la localisation de la ou des douleurs de votre patient et leurs intensités.
- Dans l'onglet **Type de chaussures (3)**, vous pouvez ajouter la rigidité et l'amorti des chaussures de votre patient.
- Dans l'onglet **Aide à la marche (4)**, l'éventuel dispositif d'aide à la marche utilisé par votre patient.

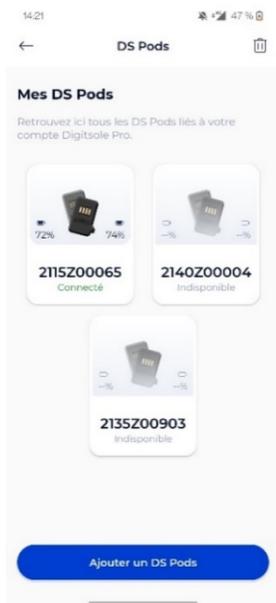


Puis sélectionnez la paire de DSPods avec laquelle vous allez réaliser l'acquisition, l'application va alors lancer une connexion aux DSPods et vous serez redirigé vers l'écran permettant de démarrer l'analyse.



ATTENTION : Si vous avez plusieurs paires de DSPods, faites attention de bien sélectionner les DSPods correspondants à ceux se trouvant dans les semelles de votre patient.

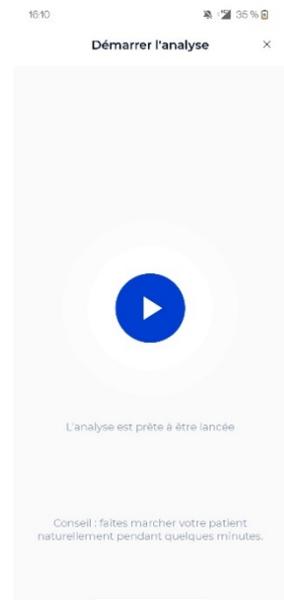

Une fois les DSPods dans les semelles et les semelles insérées dans les chaussures du patient, cliquez sur le bouton **Play** pour démarrer l'acquisition. Une fois le chronomètre apparu, votre patient doit tenir une position statique pendant 3 à 5 secondes pendant l'initialisation, il peut ensuite démarrer sa marche ou sa course.

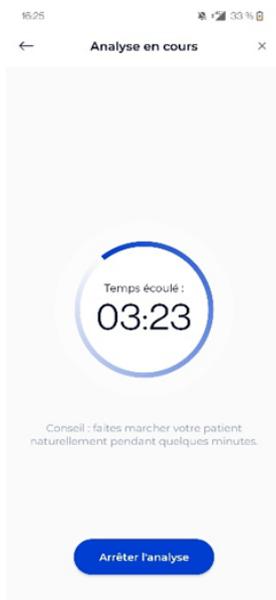

Pour arrêter l'acquisition, cliquez sur bouton **Arrêter l'analyse**. Une fois l'acquisition terminée, les données sont directement transférées sur l'interface Web Digitsole® Pro.

Application Mobile

Comment télécharger l'application mobile ?

L'application Digitsole® Pro est gratuite et compatible avec les appareils mobiles qui prennent en charge iOS 15.0+ et Android 6.0+. Pour savoir quels appareils sont compatibles avec les applications, veuillez vérifier la version du micrologiciel sur votre téléphone.

Pour trouver l'application, tapez Digitsole® Pro dans la barre de recherche :

- De l'App Store® pour les appareils iOS
- Du Google Play™ store pour les appareils Android



Comment se connecter à l'application Digitsole® Pro ?

📶 69% 4:09 PM



**Bienvenue sur
Digitsole Pro**

Adresse e-mail

Mot de passe


Pour accéder à l'application, assurez-vous d'avoir créé votre compte sur l'interface web au préalable, (<https://app.digitsolepro.com/auth/sign-up>) ce sont les mêmes identifiants qui vous permettront de vous connecter à cette application.

Entrez l'adresse email et le mot de passe de votre compte pour vous connecter.

En cas d'oubli de mot de passe, rendez-vous sur l'interface Digitsole® Pro pour en générer un nouveau.

Comment ajouter des DSPods ?

Pour ajouter des DSPods à votre compte depuis l'écran principal de l'application :

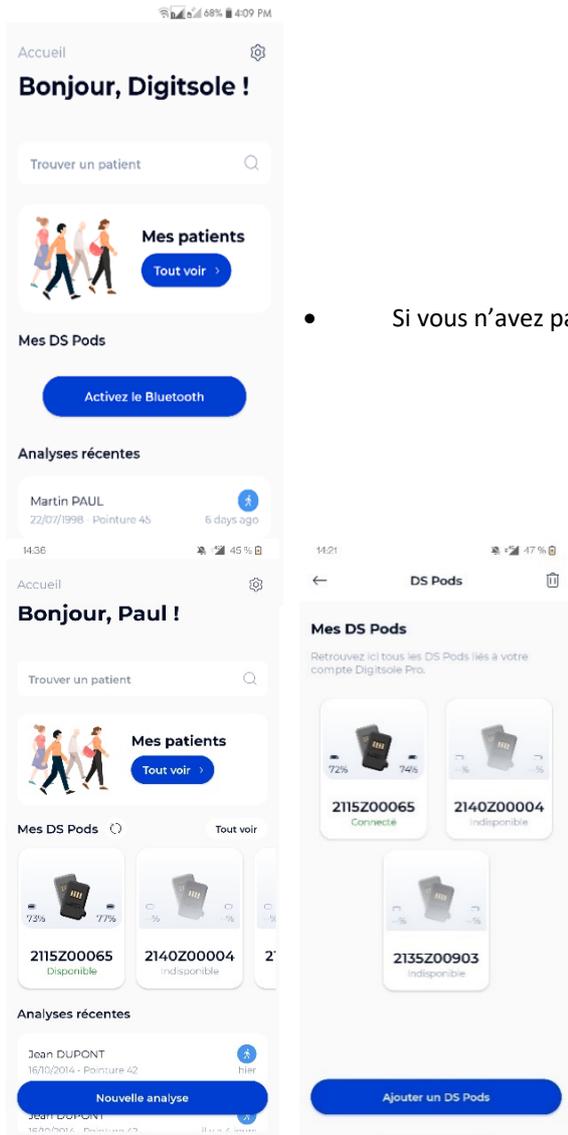


- Si vous n'avez pas encore de DSPods, cliquez sur Ajouter dans la partie "DSPods".

- Si vous avez déjà des DSPods, cliquez sur **Voir tout** dans la partie "Mes DSPods", vous serez alors redirigé sur la liste de vos DSPods. Cliquez sur **Ajouter** une paire.

Une nouvelle page s'ouvre, scannez le code Datamatrix situé sur votre paire de DSPods pour l'ajouter à votre compte. Recommencez la manipulation si vous possédez plusieurs paires de DSPods.

Si votre code Data Matrix est illisible, merci d'ouvrir un ticket sur <https://www.digitsolepro.com/customer-support>

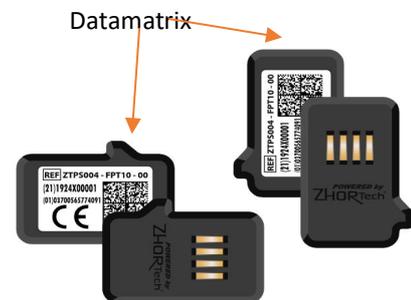

Comment mettre à jour les DSPods ?




Cliquez sur **Vérifier les mises à jour** pour vérifier la version des DSPods et voir s'ils doivent être mis à jour.

Comment supprimer les DSPods ?



Depuis l'écran principal de l'application, cliquez sur **Voir tout** dans la partie "Mes DSPods", vous serez alors redirigé sur la liste de vos DSPods. Cliquez sur l'icône poubelle situé en haut à droite de l'écran, sélectionnez, la ou les paire(s) que vous souhaitez supprimer puis cliquez sur **Supprimer les paires sélectionnées**. Cliquez sur l'icône croix en haut à droite de l'écran pour quitter le mode suppression.

Comment vérifier les niveaux de batterie des DSPods ?

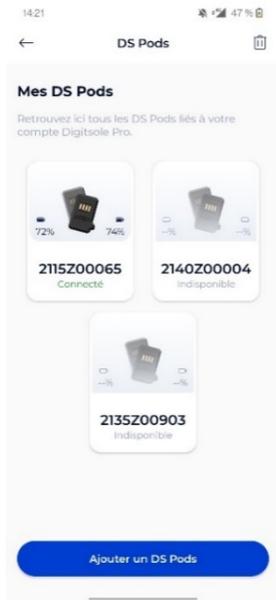

Lorsque les DSPods sont en charge, il n'est pas possible de visualiser le niveau de charge de vos DSPods pendant qu'ils sont branchés et en charge.

Allez sur la page DSPods, pour connaître le niveau de charge de vos DSPods. Les niveaux de charge des batteries des DSPods gauche et droite apparaissent. Vous pouvez rafraîchir les niveaux de batterie en glissant l'écran vers le bas.

Si vous ne parvenez pas à voir le niveau de charge des batteries même après avoir rafraîchi la page, vos DSPods sont peut-être « endormis » (pour économiser de l'énergie, ils s'éteignent automatiquement après environ 20 minutes). Pour les « réveiller », secouez-les fermement (veuillez NE PAS les frapper sur une surface dure car cela pourrait endommager les capteurs). Ensuite, vous pouvez rafraîchir la page en glissant vers le bas de votre écran, les niveaux de batteries peuvent prendre jusqu'à 30 secondes pour s'afficher.

Comment ajouter un patient?

Pour ajouter un patient à votre compte depuis l'écran principal de l'application, cliquez sur **Voir tout** dans la partie "Mes patients", puis sur le logo + en haut à droite de votre écran pour ajouter un nouveau patient




Un formulaire s'ouvre, complétez la fiche patient en remplissant au minimum la page informations et la page pathologie. Si votre patient ne présente aucune pathologie, choisissez l'option « Patient sain ».

Il est important de choisir la bonne pathologie, cela aura un impact sur les interprétations et les normes des analyses.

L'onglet contact n'est pas obligatoire mais vous permet de rentrer les coordonnées de votre patient afin de pouvoir facilement le contacter.

NB : Si vous utilisez les unités impériales, pour avoir accès aux pointures homme ou femme, il est nécessaire de choisir au préalable le genre de votre patient


Comment modifier un patient ?

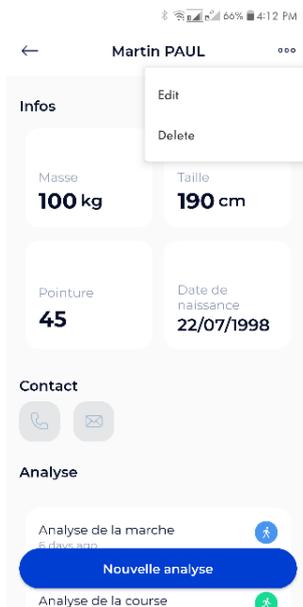

Depuis la liste des patients, cliquez sur le patient que vous souhaitez modifier, la fiche patient s'ouvre alors. Cliquez sur le menu situé en haut à droite de l'écran puis sélectionnez **Editer**. Le formulaire s'ouvre, faites les informations souhaitées puis cliquez sur **Valider** pour enregistrer vos modifications.

La fiche patient sera alors mise à jour.


Comment supprimer un patient ?

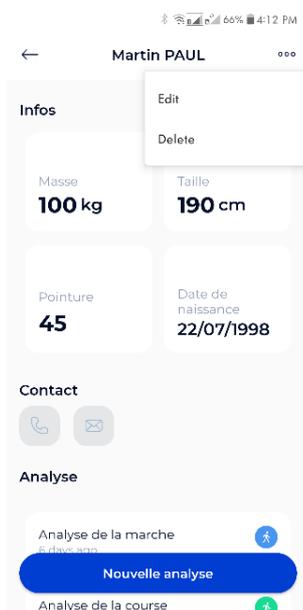

Depuis la liste des patients, cliquez sur le patient que vous souhaitez supprimer, la fiche patiente s'ouvre alors. Cliquez sur le menu situé en haut à droite de l'écran puis sélectionnez **Supprimer**, puis confirmez la suppression. Vous serez alors redirigé sur la liste des patients à jour.

A noter : Cette action est irréversible.

Comment contacter un patient ?

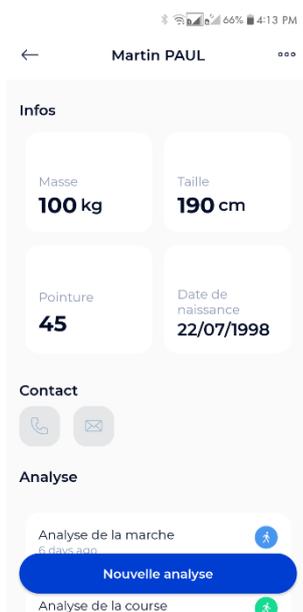

Depuis la liste des patients, cliquez sur le patient que vous souhaitez contacter, la fiche patiente s'ouvre alors.

Si le numéro de téléphone de votre patient a été renseigné, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton **Appeler**. Si l'email de votre patient a été renseigné, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton **Envoyer un message**.

Comment rechercher un patient ?




Depuis la liste des patients, dans le champ texte en haut de l'écran, tapez le nom et/ou le prénom du patient que vous recherchez.

Comment voir les résultats d'analyse ?

Cliquez sur **Voir tout** dans la partie “Mes patients”, puis sélectionnez le patient désiré. Vous êtes à présent sur la fiche du patient.

Dans la section “Analyses”, cliquez sur l’analyse à laquelle vous voulez accéder.


En haut, vous pouvez choisir le type de vue que vous souhaitez avoir : **Général ou Détails**.

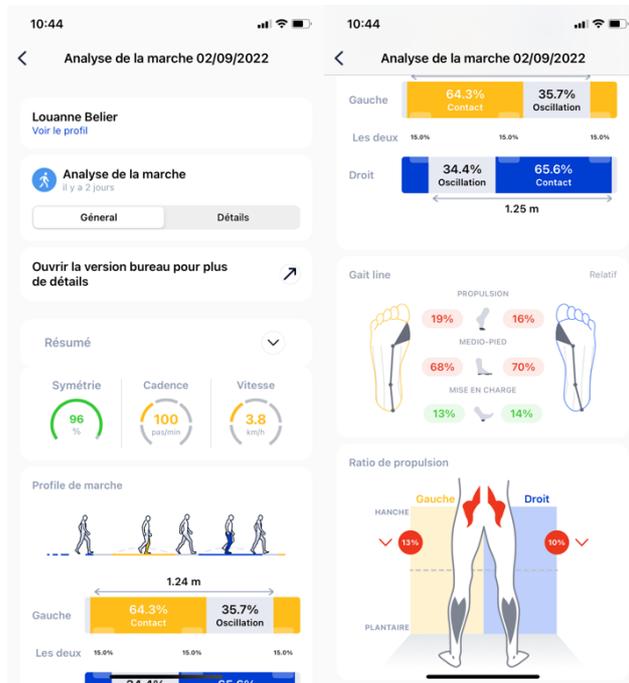

Pour avoir une analyse plus détaillée des résultats cliquez sur le bouton **Pour plus de détails** qui vous renverra automatiquement vers l’interface Web Digitsole® Pro.


Module optionnel - Vidéo

Comment ajouter une vidéo depuis l'application mobile ?

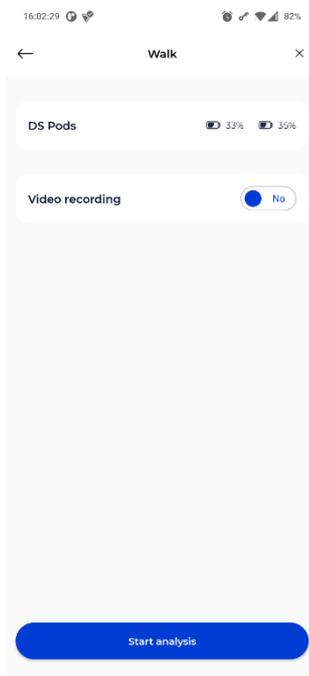

Pour filmer un patient lors de son acquisition, commencez une activité comme habituellement. Une fois votre paire de DSPods sélectionnée, vous pourrez choisir d'activer ou non l'enregistrement vidéo.

Si vous choisissez d'activer la vidéo, celle-ci commencera au début de l'analyse et s'enregistrera automatiquement au moment où vous arrêterez l'activité.

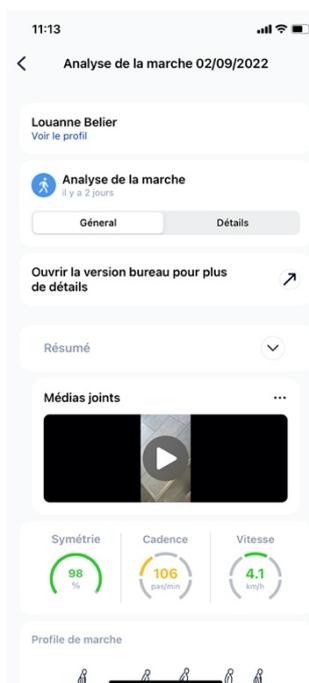

A la fin de l'activité, vous pourrez retrouver la vidéo au même endroit que les résultats de l'analyse.

Comment ajouter une vidéo depuis l'interface web ?


Il n'est pas possible d'ajouter une vidéo depuis l'interface web.

Comment supprimer une vidéo ?

Depuis l'application mobile, il ne vous est pas possible de supprimer la vidéo.

Depuis l'interface web, en cliquant sur le bouton ... en haut à droite de la vidéo, vous pourrez supprimer la vidéo associée à l'analyse.

Cette action est irréversible.

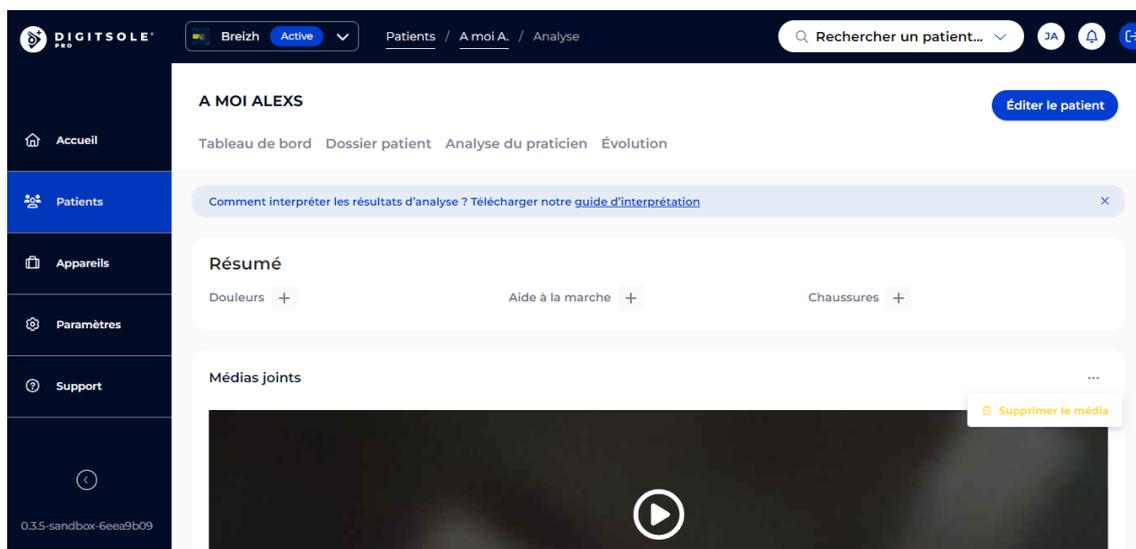

Quelle est la durée maximale d'une vidéo ?

La taille de la vidéo ne peut pas dépasser 200 mb.

La durée maximale de la vidéo dépendra donc de la résolution de votre enregistrement.

Module Optionnel - PRM

Comment le capteur DSPod mesure-t-il la détente ?

Il s'agit d'un calcul courant utilisant le mouvement de la masse (poids), la gravité, le temps dans l'air et le fait que le sujet décolle et atterrit au même endroit. C'est généralement ainsi que la hauteur de saut est présentée avec les plates-formes de force.

Dans l'application vidéo, les vidéos peuvent-elles être téléchargées sur mon interface web ?

Oui.

Dois-je tester les deux pieds lors des tests ou puis-je n'en faire qu'un ?

Pour calculer correctement les résultats, les deux pieds doivent être collectés de manière appropriée. Il est important de faire une comparaison entre le pied droit et le pied gauche.

Combien de temps faut-il pour exécuter la batterie de tests complète ?

Cela prendra 5 à 10 minutes avec un repos approprié.

Dois-je effectuer tous les tests pour que cela fonctionne ?

Non, vous pouvez choisir les tests à effectuer individuellement.

L'ordre dans lequel j'effectue les tests est-il important ?

Non, cependant le Side Hop Test est le plus fatigant et peut créer une fatigue qui pourrait influencer les résultats d'autres tests. Si d'autres tests sont effectués en plus du test Side Hop, le test Side Hop doit être effectué en dernier dans la séquence.

J'ai effectué le Side Hop Test, et l'analyse n'a montré qu'une erreur, que s'est-il passé ?

Il est important que la distance parcourue soit d'environ 40 cm ou 15,75 pouces.

Comment la stabilité des contacts est-elle calculée ?

L'angle de stabilité est la différence d'angle entre le pied en angle de pronation et l'angle minimum pendant la phase d'appui.

Puis-je faire plusieurs tests à la suite sans m'arrêter ?

Non, chaque analyse devra être terminée et les résultats transférés avant qu'un nouveau test puisse être effectué.

Est-il possible de faire trois tests de saut d'affilée et de voir la moyenne des trois tests ensemble sur le triple saut ?

Non, puisque les analyses sont basées sur les protocoles standard de test de saut, chaque test doit être effectué individuellement et les résultats sont affichés individuellement. Cependant, pour voir les résultats du même test effectué plusieurs fois côte à côte, choisissez la vue Évolution.

Puis-je obtenir des données pour une seule jambe à partir d'un test CMJ ?

Oui, le test fournit des données pour une seule jambe, mais il est effectué comme un test à deux jambes. Les analyses sont basées sur les protocoles standard acceptés de test de saut, les tests doivent être effectués comme indiqué. Afin de recueillir des données précises, les deux pieds doivent atterrir sur le sol.

Puis-je utiliser un seul DSPod dans une seule chaussure pour collecter des données pour une seule jambe ?

Non, puisque les analyses sont basées sur les protocoles standard acceptés de test de saut, les tests doivent être effectués comme indiqué. Afin de recueillir des données précises, les deux pieds doivent atterrir sur le sol.

Module Optionnel – Migration PodoSmart

Comment migrer mes données PodoSmart sans compte Digitsole Pro ?

Si vous n'avez pas de compte Digitsole Pro, veuillez-vous référer à la section "Installation du produit" de ce document et suivez les étapes pour créer votre compte.

Ensuite, assurez-vous auprès de votre revendeur que vous avez accès à l'option "Podosmart Migration" avec votre compte.


Si vous êtes prêt pour la migration, vous pouvez passer à la suite de l'instruction.

Comment migrer mes données PodoSmart avec un compte Digitsole Pro ?


- Sur l'interface web Digitsole Pro, allez dans le menu « Paramètres », et cliquez sur l'onglet « Migration Podosmart ».
- Votre statut est « Deconnecté », cliquez sur le bouton "Connecter" ci-dessous.




- Une nouvelle page s'affiche. Saisissez vos identifiants Podosmart et cliquez sur "Connexion" pour relier votre compte Podosmart à votre compte Digitsole Pro.

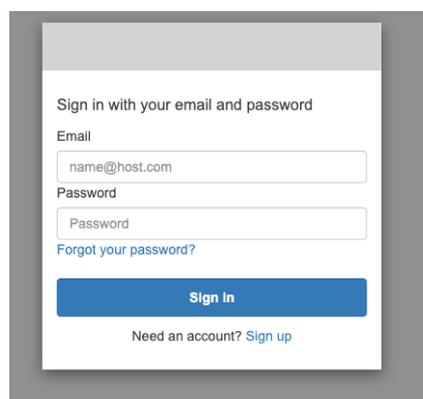


- Une fois que vous avez entré vos identifiants, vous serez redirigé vers la page des paramètres de Digitsole Pro avec un statut "Connecté".

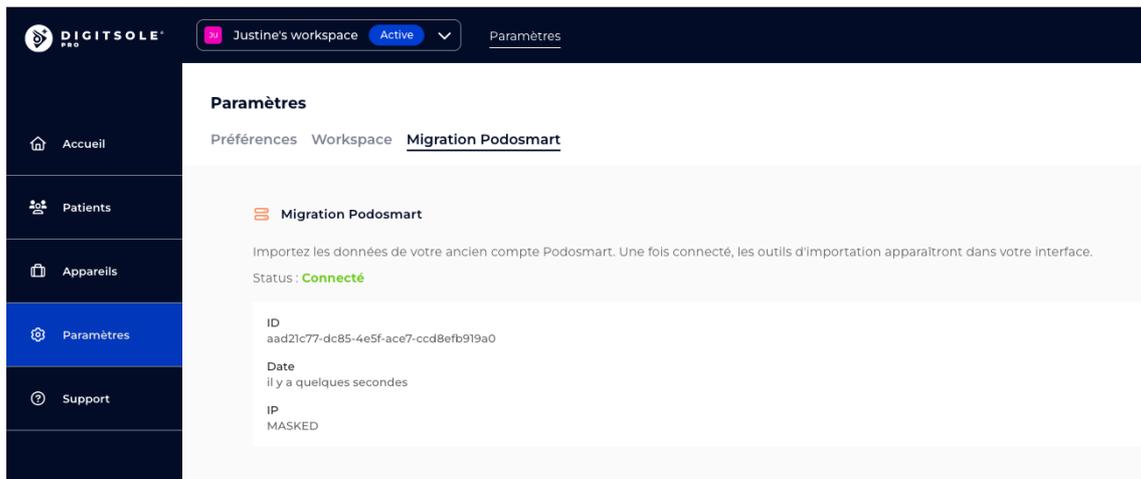


- Ensuite, allez dans le menu des patients et cliquez sur "Importer depuis Podosmart".

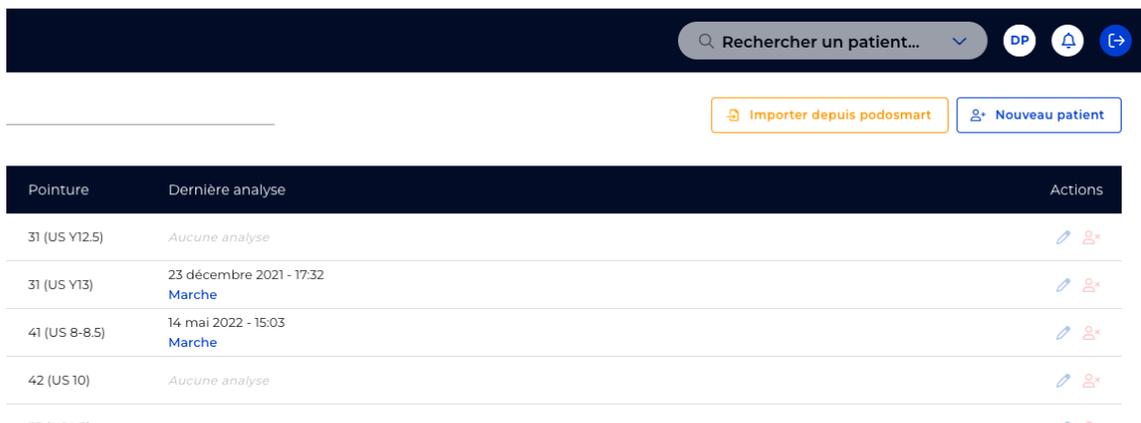

- Une fois que la liste de vos patients Podosmart apparaît, vous pouvez cliquer sur "Migrer" pour importer la fiche patient ainsi que les analyses sur votre compte Digitsole Pro. Ce processus peut prendre jusqu'à quelques minutes, en fonction du nombre d'analyses à importer.

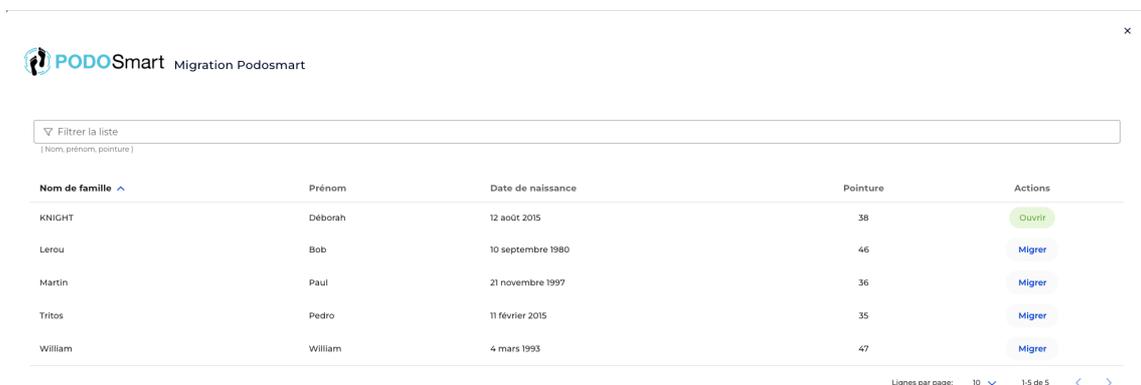

- Lorsqu'un patient est migré, un nouveau patient est créé dans votre compte Digitsole Pro, avec la mention "Migré depuis Podosmart", et les analyses migrées auront la même mention.

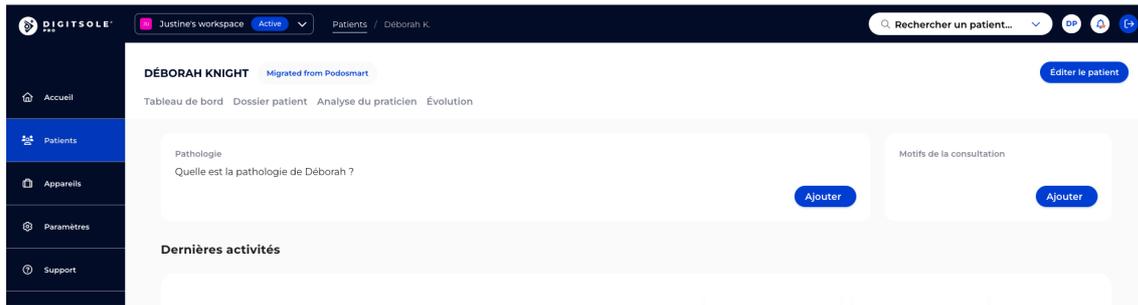

Que faut-il savoir sur la migration des analyses PodoSmart ?

- En fonction du nombre d'activités d'un patient sur votre compte Podosmart, la migration peut prendre quelques minutes, nous vous conseillons de migrer un patient avant le rendez-vous avec celui-ci.
- Une fois qu'un patient a été migré, il ne sera plus possible de migrer à nouveau, assurez-vous qu'aucune nouvelle analyse n'est faite avec Podosmart une fois qu'un patient a été migré vers Digitsole Pro.
- Si vous faites des analyses Digitsole Pro avec un patient importé, les analyses Podosmart seront marquées comme "Migrées depuis podosmart" et apparaîtront également dans l'évolution avec les analyses Digitsole Pro que vous ferez.
- Veuillez garder à l'esprit que Podosmart est un système plus ancien, il est possible que vous observiez de petites différences dans les données entre les analyses Podosmart et les analyses Digitsole Pro.
- Les analyses migrées de Podosmart sont marquées de ce logo :

